

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 JMDN31836030

GEO アナトミックス

【形状・構造及び原理等】（**）

- ・形状、型式
セット 504-0000



- | | | | |
|------|----|-------|----------|
| 上顎右側 | 臼齒 | 14-17 | 504-0100 |
| 上顎左側 | 臼齒 | 24-27 | 504-0200 |
| 下顎左側 | 臼齒 | 34-37 | 504-0300 |
| 下顎右側 | 臼齒 | 44-47 | 504-0400 |

- ・ 主成分：パラフィンワックス、カルナウバロウ、色素
- ・ 原理：症例にあわせてパターンを加工し、補綴物の蛸型を作製するために使用する。

【使用目的又は効果】（**）

- ・修復物等の製作に用いる既成パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に該当するものを除く。

【使用方法等】（**）

- ・模型材の表面にピコセップなどのワックス分離材を塗布する。
- ・カービング・埋没は通法に従い作業をする。
- ・症例にあわせてパターンを加工して使用する。

【使用上の注意】（**）

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・他の製品と混用しないこと。
- ・本製品を使用する際には必ず換気をしなが使用すること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(*)

【保管方法及び有効期間等】（**）

- ・ 室温保管
- ・ 本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・ 本製品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しないこと。
- ・ 本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（**）

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名) RENFERT GmbH