


歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 JMDN31836030

GEO トライアングルワックス

【形状・構造及び原理等】(**)

・形状、型式

オーダーナンバー・・・・・・・・・・680-3000

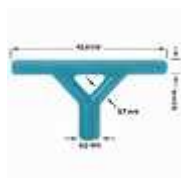

- ・主成分：パラフィンワックス、カルナウバロウ、色素
- ・原理：三角形の形状をしたワックスで、スプーリングを行うときに使用する。

【使用目的又は効果】(**)

- ・修復物等の製作に用いる既成パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に該当するものを除く。

【使用方法等】(**)

- ・症例に合わせて調節をし、ワックスパターンと固定をする。
- ・カービング・埋没は通法に従い作業する。

【使用上の注意】(**)

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・他の製品と混用しないこと。
- ・本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(*)

【保管方法及び有効期間等】(**)

- ・室温保管
- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しないこと。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(**)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名) RENFERT GmbH