

・形状、型式	オーダーナンバー
スターターセット パラレルバー付	430 0516 0
スターターセット パラレルバー無	430 0738 2
スターターセット ソフト パラレルバー付	430 0561 0
スターターセット SV	430 0738 3
パトリックス パラレルバー付	430 0520 0



マトリックス

- ・材質：樹脂
- ・外形寸法
パトリックス パラレルバー有 : $\phi 1.8\text{mm}$ $3.1 \times 3.0 \times 6.0/7.0\text{mm}$
パラレルバー部 : $\phi 2.35\text{mm}$ 長さ 20mm
パトリックス パラレルバー無 : $\phi 1.8\text{mm}$ $3.1 \times 3.0 \times 6.0/7.0\text{mm}$
パトリックス SV : $\phi 8.0\text{mm}$ $5.3 \times 3.5 \times 6.0/7.0\text{mm}$
マトリックス各種 : $3.6 \times 3.2 \times 7.0\text{mm}$
複印象用マトリックス : $3.6 \times 3.2 \times 7.0\text{mm}$
ワックスマトリックスハウジング : $4.3 \times 4.0 \times 7.0\text{mm}$
- ・原理：樹脂製の既製パターンで鋳造し、金属に置き換え、補綴物の維持として使用する。

- ・修復物等の製作に用いる既成パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に該当するものを除く。

1 / 2

【使用上の注意】 (**)

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ・パトリックスパラレルバー付、パラレルバー無を使用する場合は必ずブレーシングアームを付与すること。
- ・本製品はろう型作製以外の用途に使用しないこと。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。 (*)
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】 (**)

- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (**)

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

ブレーデント社(ドイツ)

(英名) bredent GmbH & Co. KG