

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 JMDN31836030

バリオソフト3ミニ

【形状・構造及び原理等】(*)

- | ・形状、型式 | オーダーナンバー |
|----------|------------|
| スターターセット | 430 0731 2 |
| パトリックス | 430 0732 5 |



マトリックス グリーン ソフト 430 0731 7



マトリックス イエロー ノーマル 430 0731 5

マトリックス レッド ハード 430 0731 3



複印象用マトリックス 430 0732 3



ワックスマトリックスハウジング・・・430 0732 0



* ユニバーサルパラレルホルダー 360 0115 1



*マトリックストランスファージグ・・・430 0736 5




*印は医療機器非該当製品だが、セット製品に含まれるため記載してあります。

- ・材質：樹脂
- ・外形寸法
パトリックス : 2.3×3.1×6.0mm
マトリックス各種 : 2.0×3.0×6.0mm
複印象用マトリックス : 2.0×3.0×6.0mm
ワックスマトリックスハウジング : 4.0×2.7×6.0mm
- ・原理：樹脂製の既製パターンで鋳造し、金属に置き換え、補綴物の維持として使用する。

【使用目的又は効果】（*）

- ・修復物等の製作に用いる既成パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に該当するものを除く。

【使用方法等】（*）

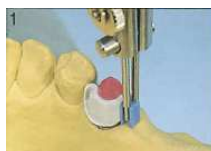

- ・専用のホルダーにパトリックスを取り付け、ワックスパターンに付与する。



- ・パターンの付与が完了したら鋳造、研磨し、複印象用マトリックスを装着してから複印象を採る。(研磨時に維持部の寸法を変えないこと)



- ・ 通法に従い、耐火模型を作製する。
- ・ 耐火模型が完成したら、通法に従い金属床のワックスアップを行う。



- ・金属床が完成したら、フレーム内に希望のマトリックスを挿入し完成。

【使用上の注意】（＊）

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ・必ずブレーシングアームを付与すること。
- ・本製品はろう型作製以外の用途に使用しないこと。
- ・使用場所には消火器を備えること。

【保管方法及び有効期間等】（*）

- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (*)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
ブレードント社(ドイツ)
(英名) breident GmbH & Co. KG