

医療用品 (03) 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋 JMDN70911000

VIP GLOVE ニトリルタイプ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・この製品は合成ゴムを使用しています。合成ゴムはかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血液低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し医師に相談のこと。 (*)
- ・合成ゴムによるアナフィラキシー様症状の経験がある医療従事者の使用及び患者への使用禁止。 (*)
- ・この製品は歯科用デスポーザブル製品なので再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】 (**)

形状：左右兼用型歯科用グローブ (*)
型式：XS、S、M、L (*)
構造：グローブの寸法・計測部位
厚さ (A) ・ (B) ・幅 (C) ・全長 (D)

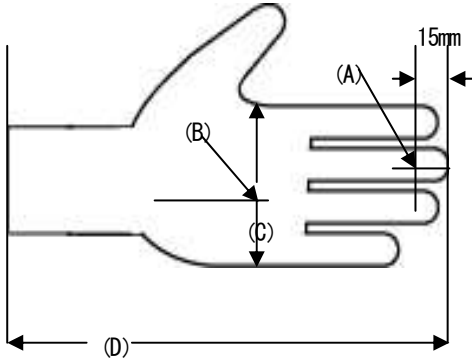

サイズ	各部の基準値 (寸法/mm)			
	A (厚さ) 中指	B (厚さ) 掌部中央	C (幅)	D (全長)
XS	0.08 以上	0.08 以上	76±4	230 以上
S	0.08 以上	0.08 以上	86±4	230 以上
M	0.08 以上	0.08 以上	98±4	230 以上
L	0.08 以上	0.08 以上	107±4	230 以上

- ・主材料：合成ゴム (*)
- ・左右兼用、未滅菌タイプ (*)
- ・表面性状：細かい梨地状、パウダーフリー (*)

使い捨て歯科用ゴム手袋: JIS T 9113:2000 による

試験項目		性能
老化前	引っ張り強さ MPa	15 以上
	切断時伸び %	500 以上
老化後	引っ張り強さ MPa	11 以上
	切断時伸び %	450 以上

- ・原理：手の形状に合わせて作られた合成ゴム製の手袋で、手に被せることで歯科の診察、治療及び処置時に感染及び汚れ等から守るために使用する。 (*)

【使用目的又は効果】 (**)

- ・本製品は歯科の診察、治療及び処置に用いるゴム製又はビニール製の手袋をいう。手術用に用いるものを除く。 (*)

【使用方法等】 (**)

- ・最小包装単位包装から手袋を取り出す。 (*)
- ・手に装着する。 (*)
- ・使用は 1 回限りで破棄すること。 (*)

【使用上の注意】 (**)

- ・本製品は、刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので注意すること。
- ・本製品は未滅菌です。
- ・使用前にピンホール、破れが無いことを確認の上、使用すること。
- ・合成ゴムによるアレルギーの既往歴のある方は使用しないこと。 (*)
- ・本製品はデスポーザブルタイプですので、感染防止のため患者ごとに新しいものに取り替えること。

【保管方法及び有効期間等】 (**)

- ・品質保持のため、高温・多湿・直射日光のあたる場所は避けて、保管してください。
- ・使用期間：製造年月より 3 年間 (個装箱に記載)
(自己認証による)
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (**)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
ハータレガ社 (マレーシア)
(英名) Hartalega Sdn. Bhd