

歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器 歯科セラミックス用着色材料 (70823000)
ネオ ステイン

【形状・構造及び原理等】(**)

1) 形状・構造

本品は、セラミックス系歯科修復物の色調調整を行うためのパウダー及びペースト陶材、パウダー陶材を練和する練和液から構成されている。

本品は、以下の陶材・練和および希釈液があり、記載の成分を含有する。

| 陶 材 | 形状 | 主成分 |
|--|------|------------------|
| メイク アップ ネオ | ペースト | 長石、二酸化ケイ素 |
| イン ノバ ネオ | 粉末 | 長石、二酸化ケイ素、アルコール類 |
| 練和及び希釈液 | | 主成分 |
| メイク アップ ネオ フルード イン ノバ ネオ フルード リコンディショナー フルード | 液体 | アルコール類 |

2) 原理

陶材粉末を練和及び希釈液で練和し、セラミックス系修復物に塗布し、焼成することにより色調調整を行う。

【1】陶材

| 項 目 | 仕 様 |
|-----|-------------|
| 外 観 | 異物の混入がないこと。 |

【2】練和液

| 項 目 | 仕 様 |
|-----|-------------|
| 外 観 | 異物の混入がないこと。 |

【使用目的又は効果】(**)

セラミックス系歯科修復物の色調調整に用いる。

【使用方法等】(**)

陶材粉末を練和液で練和し、セラミックス系歯科修復物に塗布し、歯科技工用ポーセレン焼成炉で焼成する。
本品の練和物を塗布するほか、各母材の粉末に本品を適量混合することも可能である。
本品の適用及び焼成は、使用する母材の説明書に従う。

【使用上の注意】(**)

1) 使用注意

- ①本品の切削・研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可したマスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ②本品の切削・研磨の際には、目の損傷を防ぐために保護メガネなどを使用すること。
- ③患者への装着の際には、ラバーダムを使用すること。
- ④患者への装着の際には、適切なセメント材（レジンセメントなど）を用いて装着すること。
- ⑤他の製品と混用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ①本品（パウダー、ペースト、液）及び練和物は、目に入らないよう注意すること。万一、目に入ったときは、直ぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ②患者への装着時には良く洗浄し、汚染物質を除去すること。

【保管方法及び有効期間等】(**)

【保管方法】

- ・本品の練和液は、高温場所での保管、蓋をとったままの保管は避けること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

使用説明書を必ずご参照ください。