

2015 年9月1日作成 (第2版)(※)

2014 年10月1日作成 (第1版)

届出番号：11B2X00019JDS001 号

機械器具68 印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器 歯科材料加温器 70720000

JDS遠赤ウォーマー

【形状・構造及び原理等】

形 状：W120×D150×H95(mm)・約1.5kg

構造等：アルミブロックを、AC100V を電源としたヒーターにて一定時間所定の温度で加熱し、アルミブロック部にセットされたゲル状の歯科用寒天印象材をゾル状に変化させた後、使用可能な温度にて保存をする歯科材料加温器。

① JDS遠赤ウォーマー Pカートリッジシリンジ付(※)

② JDS遠赤ウォーマー(※)

【使用目的・効能又は効果】

使用目的・用途：歯科用寒天印象材等を適切な使用状態に維持するために用いる加温装置。

【品目仕様】

型式：DEC-5

定格電源：AC100V、50/60Hz

電源入力：150VA

溶解温度：98±1℃

溶解保持時間：1～30 分

保存温度：55～70℃

予約タイマー：1～60 時間

メモリー機能：予約タイマー・溶解保持時間・保存温度

寒天処理能力：カートリッジ16 本 (8 本×2)

寒天ガイドカバー：カートリッジタイプ用

異常保護：過熱検知105℃ ヒューズ 2A

寸法・質量：W120×D150×H95(mm)・約1.5kg

【操作方法又は使用方法等】

(1) アルミブロックの所定位置に歯科用寒天印象材カートリッジ一日使用分をセットし、POWER ボタンを押す。

(赤ランプ点灯)

(2) 設定温度の変更が必要な場合はこの時点で行う。

(3) 自動的に加温が完了し、約 35 分で使用可能。

(緑ランプ点灯)

(4) 印象採得時に術者の手に少量採って、適温であることを確かめてから使用する。

【使用方法上の注意】

(1) 赤色ランプ点灯中は、ガイドカバー（黒い部分）及び寒天カートリッジには触れない事。

(2) POWER ボタンをOFF にした時には、直ぐに電源コードを抜かない事。火傷防止のため50℃以下に冷えるまでファンが回転しています。

(3) 使用後はPOWER ボタンをOFF にする事。また長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く事。絶縁劣化による感電・火災のおそれがあります。

(4) ガイドカバー内に流出した寒天を清掃するため、またガイ

ドカバーを交換するためにガイドカバーを取り外す場合は、必ず電源プラグを抜き、本器の内部が冷えてから作業する事。

(5) 底面の調整用ネジ類には一切手を触れない事。異常動作してけがをするおそれがあります。

(6) 温度異常の場合（数値表示部がHiで点滅し、電子音がビッピッと連続している時）には、速やかに電源プラグを抜く事。異常動作をしてけがをするおそれがありますので、サービスマンによる点検修理を受けてください。

【使用上の注意】

(1) 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない事。感電するおそれがあります。

(2) 水をかけない事。感電・火災のおそれがあります。

(3) 電源コードを傷つけたり、加工したり、力をくわえない事。

(4) 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って引き抜く事。コードの損傷を招き、感電・火災のおそれがあります。

(5) 保守・点検の項目以外の分解・修理や改造は絶対に行わない事。

(6) 本器は、歯科医療有資格者以外は使用しない事。

(7) 引火性のものを近くに置かない事。爆発したり火災のおそれがあります。

(8) 交流 100V・2A以上の電源コンセントを使用する事。火災・感電の恐れがあります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法：直射日光を避け、高温多湿でないところ。

使用期限：なし

【包装】

ダンボール外箱にて単品包装。

① JDS遠赤ウォーマー Pカートリッジシリンジ付(※)

(本体×1 台、カートリッジガイドカバー×1 組、使用説明書×1 冊、添付文書×1 枚、Pカートリッジシリンジ×1 個)

② JDS遠赤ウォーマー(※)

(本体×1 台、カートリッジガイドカバー×1 組、使用説明書×1 冊、添付文書×1 枚)(※)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元

及び製造元 株式会社 クラーク

住所 〒340-0832 埼玉県八潮市柳之宮屋敷通223番地2

電話番号 048-994-1825

販売元

株式会社日本歯科商社

住所 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5

電話番号 03-3625-3111