

歯科材料05 歯科用接着充填材料

管理医療機器 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材(31780002)

コンシール f

シリンジチップ27Gは再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本材又はメタクリル酸系のモノマーに対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ・シリンジチップ27Gは再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は以下の構成成分があり、性状、形状、成分は記載のとおり。

構成成分	性状	形状	成分
コンシール f	ペースト	シリンジ	TEGDMA、二酸化ケイ素、ジメチルアミノエチルメタクリレート、フッ化ナトリウム、カンファーキノン、その他
スーパーエッチLV	ジェル	シリンジ	精製水、リン酸(37%)、着色剤、その他
シリンジチップ27G			

2. 原理：スーパーエッチLVは歯面をエッチングし、填塞されたコンシール f のペースト中のモノマーが光重合して硬化するものである（クラス2）。

【使用目的又は効果】

歯科小窩裂溝の封鎖に用いること。
歯のエッチング（技工専用を除く。）に用いること。

【使用方法等】

1. 患部をフッ化物や油分を含まない研磨材等で清掃します。
2. 十分に洗浄し、防湿します。
3. 必要な場合には、小窩裂溝の健康な部位を削去しない様に注意して形成します。
4. エッチング部位を清潔で油分を含まぬエアで乾燥します。
5. SDI社製スーパーエッチLVにて30秒～60秒間エッチングします。
6. 十分に水洗します。
7. 清潔で油分を含まぬエアで15秒間、十分に乾燥します。
8. コンシール f を填塞します。
9. コンシール f を約20秒間（SDI社製ラディプラスあるいは同等品、光波長440-480nm）光重合します。防湿状態が維持されている場合にはさらに積層することができます。
10. 表面の未重合層を拭きとって、気泡の有無を確認します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 室温（20～25℃）で使用する。
2. エッチング後に乾燥させたエナメル質は、白色でつや消し状となります。そのようにならない場合、もしくは患部が唾液又は血液等で汚染された場合は、4) から7) の手順を繰り返します。
3. 初回使用時、もしくは長期保管した後にご使用の場合は、コンシール f 及びスーパーエッチLVを少量練和紙上に押し出して、粘度及び出具合を確認してからご使用下さい。
4. シリンジチップ27Gをシリンジに確実に装着して下さい。
5. 本材は容器のキャップを取ったまま放置しないこと。
6. 使用後必ずキャップを確実に閉めて保管してください。
7. シリンジチップ27Gを材料ごと使いわけてください。又、使用ごとにシリンジチップ27Gを廃棄してください。
8. 窓際又はライト直下等、明るい場所ではコンシール f が硬化することがありますので、強い光を避けて使用してください。

【使用上の注意】

【使用注意】

- * 1. 本書に記載の【使用目的又は効果】以外には使用しないこと。
- 2. 歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- 3. 感染予防のため、必ず保護グローブ等を使用すること。
- 4. 他の製品と混合して使用しないこと。
- 5. 誤飲させないこと。万一、誤飲させた場合には、うがいをさせ、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- 6. 使用後の容器は、「廃棄物に関する法律」に従い、適切に処理すること。

【重要な基本的注意】

1. 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
2. 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
3. 本品の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。
4. 本品を口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。軟組織や皮膚に付着した場合は、すぐに多量の流水で洗浄すること。万一、目に入った場合はすぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けさせること。
5. スーパーエッチLVは強酸であるので、誤飲をさせないこと。また、口腔粘膜、皮膚、衣服へ接触を避けること。

【保管方法及び有効期間等】

* [保管方法]

- ・高温多湿を避け10～25℃の暗所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

* [使用期限]

包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。

【包装】

【キット包装】

コンシール f シリンジキット	
・コンシール f シリンジ 1g	3本
・スーパーエッチLVシリンジ 1mL	1本
・シリンジチップ27G	20本

【単品包装】

コンシール f シリンジレフィル	
・コンシール f シリンジレフィル 1g	1本
・シリンジチップ27G	5本
スーパーエッチLV シリンジレフィル	
・スーパーエッチLV シリンジレフィル 1mL	1本
・シリンジチップ27G	5本

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社エイコー
住所	東京都台東区上野3-17-10
製造業者	SDI Limited (エスディーアイ リミテッド)
製造国	オーストラリア (Australia)
販売業者	株式会社日本歯科商社
東京本社	東京都墨田区石原1-19-5 TEL 03-3625-3111