

医療用品（01）エックス線フィルム
一般医療機器 スクリーン型歯科画像診断用 X 線フィルム JMDN40977000

JDS パノラマフィルム

【形状、構造及び原理等】

〔形状・構造〕

支持体に銀塩感光材料を塗布したものです。

〔動作原理〕

フィルム乳剤中のハロゲン化銀に X 線や、増感紙からの蛍光が照射されると、目に見えない像が形成されます。この目に見えない像を現像することにより、目に見える銀画像にすることが出来、この黒い銀画像が診断画像となります。

〔型式〕

レギュラータイプ
オルソタイプ

【使用目的、効能又は効果】

特に歯科用 X 線装置で使用するためにサイズを定めて設計したスクリーン型 X 線フィルムをいう。

【品目使用等】

ISO4090:2001 及び ISO18906:2000 による。

【操作方法又は使用方法等】

本フィルムを歯科用 X 線フィルムカセットに装填し、X 線撮影を行った後現像処理を行う。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 適切な安全光の下で開封すること。
2. 開封後はなるべく早めに使用すること。又、遮光のため、内袋に入れたまま保管すること。
3. 局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
4. フィルムが接着するような極度は高湿度下での使用は避けること。
5. 静電気が発生するような極度な低湿度下での取扱いは避けること。
6. 濡れた手による取扱いは避けること。
7. 二重露光は避けること。
8. 使用目的以外に使用しないこと。
9. 長時間高湿度下での取扱いは避けること。特にスポットライトや OHP を使用する場合には注意すること。

その他の注意事項

フィルムを廃棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

- (ア) 未使用フィルムは直射日光や強い光源を避けて、放射線や X 線及び有害ガス(ホルマリンガス、硫化水素ガス等)の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。推奨温度・湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。
- (イ) 現像後のフィルムは、薬品、溶剤などの付着により画質に影響を及ぼします。直射日光や高温になる室内・車内での長時間の放置は避けてください。

2. 有効期間

有効期間(使用期限)は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【包装】

サイズ・枚数・包装形態については、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【製造販売業者及び製造業者の名称および住所等】

製造販売業者： 株式会社グローバルビジョン

住所： 156-0044 東京都世田谷区赤堤 1-29-2

電話番号： 03-5355-3758

製造業者名： アグファ・ゲバルト エヌ・ヴィ
Agfa-Gevaert N.V.

住所： Septestraat 27, B-2640 Mortsel,
Belgi