

歯科材料 6 歯科用印象材料
管理医療機器 歯科用アルギン酸塩印象材 35863000
アルデックス・ペースト

【形状・構造及び原理等】

該当規格：JIS T 6505「歯科用アルギン酸塩印象材」

形 状：ペースト

主成分：アルギン酸ナトリウム、ケイソウ土

原 理：アルギン酸ナトリウムと石膏と反応させてゲル化させ、
口腔内の印象を採得する。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：大成歯科工業株式会社

発売元：株式会社日本歯科商社

住所：東京都墨田区石原 1-19-5

電話番号：03-3625-3111

【使用目的又は効果】

口腔内の印象を採得する。

【使用方法等】

- 1) ラバーボールに適量（50g）のペーストをとり 1/5～1/3 量（10～17g）の石こう（歯科用焼石こう）を 30～40 秒間手早く練和します。
- 2) 練和後トレーに盛り、口腔内で約 1～3 分間保持します。
- 3) 口腔内から撤去し流水で洗浄した後、余剰水分を取り除き、直ちに石こう（歯科用硬質石こう）を注入します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 開封するときは用具の取扱に注意すること。
- 2) 使用する缶は安定した場所に置き、落下などによる事故のないようにすること。
- 3) ペーストの温度が低いと粘度が高く固くなるので、暖めて使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 本材を使用する際には、アルギン酸塩印象材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。また本材の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医者 の 診察を受けさせること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また本材の使用により過敏症状を起こした場合は使用を中止し、すぐに医者 の 診察をうけること。
 - ② 本材又は練和物は目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ③ 採取した印象は、血液・唾液などを十分洗浄後、必要に応じ消毒を行うこと。
 - ④ 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
 - ⑤ 他の製品と混用しないこと。

【保管方法及び有効期限等】

〔保管方法〕

- ・本材は、高温の場所を避けて保管する
- ・本材は、使用後は蓋を閉めて保管する。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

〔有効期限〕

本材は包装に記載の使用期限までに使用すること。

〔記載の使用期限は自己認証(当社データ)による。〕

※（例 2018-06 は
使用期限 2018 年 6 月 を示す）