

歯科材料(03) 義歯床材料
一般医療機器 歯科用パターンレジン JMDN70833000

イーजीフォーム LC ペースト

【禁忌・禁止】

本製品は技工作業にて使用するものですので口腔内では使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】 (*)

・形状、型式 オーダーナンバー
30g入 03375



- ・主成分 脂肪族ポリエステルトリウレタントリアクリレート
- ・硬化時間 UV/UVA 約3分30秒～5分
ハロゲン 約2分
ストロボ 約1分30秒
LED 約20秒
- ・原理：容器にからペーストとり模型に築盛し外冠パターン製作等に使用する。

【使用目的又は効果】（*）

- ・インレー、クラウン等鑄造用パターンの作製に用いるレジンをいう。
 技工作業での仮着に使用することがある。

【使用方法的等】（*）

- ・ポリウレタン系の模型材に使用する場合は分離剤としてワセリンを一層塗ります。
- ・容器からペーストを適容量インストルメント等でとり、築盛します。
- ・築盛の厚さ 1mm 毎に仮重合を行ってください。(LED は 20 秒、ラボ用ハロゲン装置は 60 秒)
- ・築盛が終わったら光重合器にて重合を行います。(光重合器の種類によって重合時間が異なるので注意して下さい)
- ・硬化を防ぐために、作業中でも容器のフタは都度閉めてください。

【使用上の注意】 (*)

- ・本製品は火気の近くで作業しないこと。また、十分な換気がなされている場所で使用すること。
- ・保護メガネ、手袋を装着して使用すること。皮膚に付着した際は、流水で洗淨すること。
- ・本製品が目に入った時には、すぐに流水で洗淨し医師の診断を受けること。
- ・本製品の使用により、発疹、皮膚炎等のアレルギー性症状を起こした場合は使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ・本製品は、火気厳禁の冷暗所に保管すること。
- ・他の材料と混用して使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】（*）

- ・本製品は直射日光が当たらない暗所に保管すること。
- ・本製品は15℃～25℃で保管すること。
- ・使用期間は製造から2年間。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (*)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
デタックス社(ドイツ)
(英名) DETAX GmbH & Co. KG