

機械器具(65) 歯科用充填器
一般医療機器
歯科用根管ペーストキャリア JMDN コード：42336000
ニエットキャリア

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- (1) 本品を変形させたり切削したりする等の加工・改造は行わないこと。
- (2) 水分が付着したまま保管しないこと [錆びる恐れがある]。
- (3) 使用後は先端パイプ内部の溶剤を全て除去すること。[破壊の恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼及びアルミニウムである。

(1) 標準



(2) 小



****＜動作保証条件＞**

以下の指定する薬剤を使用すること。

- ・ 3 Mix-MP

＜原理等＞

先端のパイプ先に 3 Mix-MP を採取し、患部まで運ぶ。ニエットキャリアの先端が貼薬着座の窩洞底に達するように挿入し、挿入後レバーをいっぱい押し、薬剤を押し出す。

【使用目的又は効果】

作業部分がらせん又は円錐コイル様のばね形状を備えた手持型歯内器具をいう。根管に充填物又は薬剤を送達するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- (1) 薬剤の採取
 - ・ 数回空打ちを繰り返し、パイプや押し出し棒にゆがみがないか確認をする。
 - ・ 混和した 3 Mix-MP をパイプ内に充填する。その際にパイプや押し出し棒を曲げぬように十分に注意する。（いっぱいに入れると、一根管 1 回の貼薬ですむ）
- (2) 余分な薬剤の除去
 - ・ キャリア先端のパイプの外側に付着している薬剤を拭き取る。
- (3) 薬剤の貼薬
 - ・ キャリアの先端が貼薬着座の窩洞底に達するように挿入し、挿入後レバーをいっぱい押し、薬剤を押し出す。
- (4) キャリアの清掃
 - ・ 使用後は必ず、直ちに器具の洗浄を行いながらレバーを動か

かすことにより、パイプ内部の溶剤を全て除去すること。
※レバーを動かさないと溶剤は取りきれません。
パイプ内部に溶剤が残っていると時間と共に硬化し、そのまま使用すると器具が破損する恐れがある。3 Mix-MP 用洗浄液（別売）を用いる場合も、10 倍に希釈した洗浄液に浸してレバーを可動させうえて浸漬洗浄 30 分以上、超音波洗浄の場合は 5～15 分間洗浄を行い、パイプ内部の材料を全て除去すること。洗浄の際には器具の扱いに充分注意すること。

【使用上の注意】

- (1) 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- (2) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- (3) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ** (4) 本品は 3 Mix 専用の器具であるため、他の用途で使用しないこと。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) パイプ、押し出し棒等は大変細いので取扱いには十分に注意する。
- (2) 使用前に各パーツに緩みなどがないように十分確認すること。
- (3) 充填を行う際には周辺粘膜等に十分配慮すること。
- (4) 器具の脱落は誤飲等の重大事故につながる危険性が高いので十分に確認作業を行い注意して取り扱う。
- (5) 本品は必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認すること。口腔内を傷つける可能性がある場合には新しい物と交換する。
- (6) 本体及び各パーツが小さいので誤飲等の事故を予防するために取扱いは十分注意をして行う。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- (1) 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- (2) 本品はステンレス製ですが、湿度の高い場所に長時間放置しますと錆びて器具に装着出来なくなる恐れがありますので、湿度が低く、清潔な場所に保管して下さい。
- (3) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- (4) 一部アルミニウムを使用しているため、洗浄・滅菌の際は、アルミニウムを腐食・変色させる薬液（アルカリ系薬液等）を使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社 デンテック
〒174-0053 東京都板橋区清水町 5-3-5
TEL：03-3964-2011
FAX：03-3962-5624

2. 販売業者

株式会社 日本歯科商社
〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5
TEL：03-3962-3111
FAX：03-3925-1110