


機械器具(70) 歯科用鑄造器  
一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉 JMDN35762000

## ルカグレース

### 【形状・構造及び原理等】(\*\*)

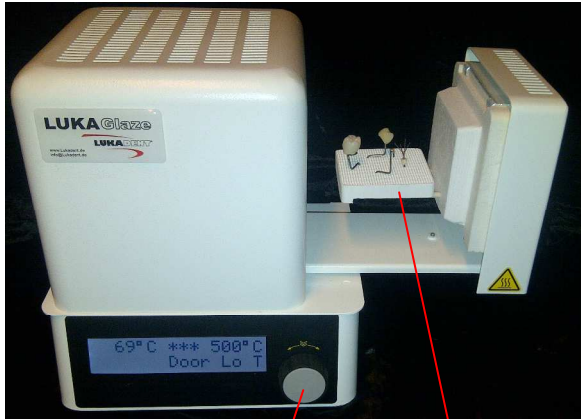

操作パネル

焼成トレー

- ・使用温度範囲：5～40℃ 相対湿度：最大 80%、結露なし
- ・使用最高温度：1100℃
- ・焼成台：55×55(mm)
- ・昇温速度：25～120℃/分
- ・温度設定範囲：低温域 50～600℃、高温域 601～1100℃
- ・係留時間：0～3 分

- ・原理：電気発熱体を使用した間接炎式炉

#### 【電気的定格】

- ・電源電圧及び周波数：AC100、50-60Hz
- ・消費電力：600W

#### 【寸法及び重量】

- ・本体寸法：幅 210mm×奥行 178mm×高さ 222mm
- ・本体重量：3.6kg

### 【使用目的又は効果】(\*\*)

- ・ポーセレンの焼成に使用する。

### 【使用方法等】(\*\*)

- ・詳細の設置方法や使用方法については、付属の取扱説明書等を必ず参照してください。
- 操作方法：
  - ・本体背面の電源スイッチを ON にします。
  - ・電源が入ると自己診断と温度キャリブレーション(約 60 秒)を行います。その後セットアップモードに入ります。
  - ・ツマミを回して任意の警告音量を選択した後、ツマミを 1 回押して音量設定をします。
  - ・ツマミを回して表示温度を摂氏(°C)か、華氏(°F)を選択し、ツマミを 1 回押して確定させます。
  - ・ツマミを回してキャリブレーションの調整をし、ツマミを一回押して確定をすると、使用準備が完了します。
  - ・ツマミを 1 回押して低温域(50～600℃)の温度を選択して、ツマミを 1 回押して設定します。
  - ・ツマミを 2 回押して昇温速度を設定して、ツマミを 1 回押して選択し、ツマミを 1 回押して設定します。

- ・ツマミを 3 回押して高温域(601～1100℃)の温度を選択して、ツマミを 1 回押して設定します。
- ・ツマミを 4 回押して係留時間を選択して、ツマミを 1 回押して設定します。
- ・マッフルがどのような温度の状態でもツマミを 2 秒以上長押しすると、設定された焼成プログラムで焼成が開始します。
- ・係留時間の 10 秒前に警告音が鳴り、焼成プログラムが終了、焼成が終了します。

### 【使用上の注意】(\*\*)

- ・設置、操作の前に必ず取扱説明書を参照のこと。
- ・必ず室内で使用する。
- ・可燃性物質の近くで操作しないこと。また、可燃性物質を本体の上、横、背面に置かないこと。
- ・アースを確保して、適切な配線で電源を供給すること。
- ・電源コードが容易にコンセントから外すことができる場所に設置すること。
- ・取扱説明書をよく読んで理解するまでは、メンテナンスを試みないこと。
- ・修理をする前には、電源コードを抜くこと。
- ・ tong や他のツールで本体を操作しないこと。
- ・操作パネルに溶剤や洗浄液を使用しないこと。
- ・本体の上部を塞がないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・本体の分解、修理、改造は絶対に行わないこと。
- ・機械的な損傷がないか、定期的に点検すること。
- ・操作パネルの清掃には溶剤、洗浄液を使わないこと。
- ・清掃時には、エアーを吹きかけないで、パキュームで埃を取り除くこと。
- ・乾いた柔らかい布で表面を清掃すること。操作パネルとツマミの周りには水が入らないようにすること。

### 【保管方法及び有効期間等】(\*\*)

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・湿気を避けて室温にて保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(\*\*)

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
ルカデント(ドイツ連邦共和国)  
(英名)Lukadent GmbH