

## マイクロフレックス

### 【形状・構造及び原理等】(\*\*)

- ・形状、型式 オーダーナンバー
- φ12mm/0.08mm . . . . . 340 0014 2



- φ16mm/0.08mm . . . . . 340 0014 1



- φ22mm/0.08mm . . . . . 340 0014 0



- ・軸部規格：JIS T5504-1 φ2.35mm(\*)
- ・切削部(ヘッド)：ダイヤモンド砥粒(\*)
- ・軸部(シャンク)：ステンレス鋼(\*)
- ・原理：ハンドピースエンジン等に装着し、金属、プラスチック、陶材又は同種の材料を研削するために使用する。(\*)

### 【使用目的又は効果】(\*\*)

- ・ダイヤモンドを用いる技工用研削材をいう。ポイント、ホイール、ディスク等を含む。(\*)

### 【使用方法等】(\*\*)

- ・ハンドピースに装備、回転させ断続的に被切削物に押し付けて分割、研磨、形態修正等を行う。

### 【使用上の注意】(\*\*)

- ・ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ・使用前に回転させて振れがないことを確認すること。
- ・頭部の細い、長い、大きい形状のものは折れたり、曲がったりすることがあるので無理な角度、過度な加圧での使用は避けること。
- ・錆び、損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- ・目を保護するために保護メガネ等を使用すること。
- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本製品により研削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】(\*\*)

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(\*\*)

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
ブレーデント社(ドイツ)  
(英名)bredent GmbH & Co. KG