


ガリレアルーペマルチTTLタイプ用プロテクトアイグラス装着の手順

手順1. プロテクトアイグラスの外側から先にフレームへはめ込みます。(写真A, B, C)

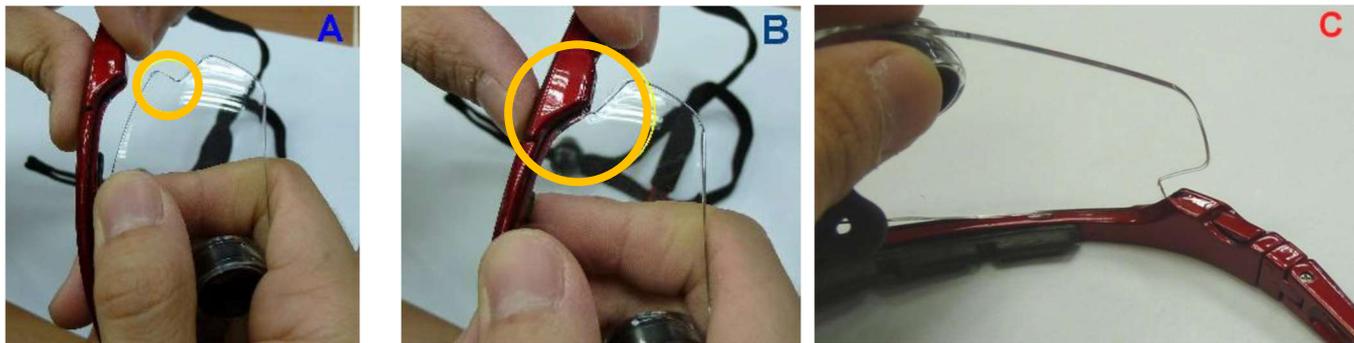

手順2. 次に内側をフレームへはめ込みます。(写真D)



手順3. この時、プロテクトアイグラスは写真E, Fのようにフレームとの間に隙間ができるので少し力を内側に向かって入れて完全にフレームの溝へはめ込みます。(写真G)



注意!

* 取り外しを行う際は、逆の手順(内側を取り外してから、外側を外す)にて行ってください。
外側から外してしまいますと、プロテクトアイグラスが破損する可能性があるのでご注意ください。
* プロテクトアイグラスの着脱の際には、必ずレンズをはずして行ってください。レンズを付けたままプロテクトアイグラスの着脱をいたしますと、余分な圧力がプロテクトアイグラスにかかり破損する可能性があります。