

機械器具(02) 医療用照明器
一般医療機器 汎用光源 JMDN32037000


デンタルLED コードレスヘッドライトⅡ

【禁忌・禁止】

- ・使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、点灯させたLEDライトを直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状、構造]

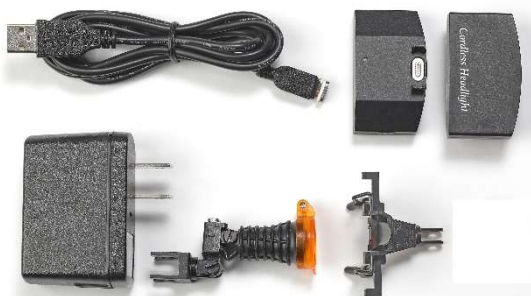

内容物

コードレスヘッドライト、バッテリーコントローラーⅡx2、遮光ライトフィルター、充電用コード、ACアダプタ、クリップオン TTL 用、マイナスドライバー、説明書

コードレスヘッドライト

- ・照度 : 10,000Lux (30 cm隔離)
- ・色温度 : 約 6,000K
- ・平均 LED ライト寿命 : 約 10,000 時間
- ・重量 : 15g

バッテリーコントローラーⅡ

- ・バッテリー容量 : 700mAh
- ・充電時間 : 約 120 分
- ・照射時間 : 約 150 分
- ・重量 : 22g

AC アダプタ

- ・型式 : AC/DC アダプタ
- ・入力電圧 : AC100V-240V 50-60Hz
- ・出力電圧 : DC5V

- ・原理:コードレスヘッドライトを点灯させることにより、視野を明るくする。

【使用目的又は効果】

- ・一般手術又は診療に用いる強い光(冷光ということが多い)を発生させる装置をいう。

【使用方法】

- ・充電用コード、AC アダプタ、バッテリーコントローラーⅡ(2個)を取り出す。

- ・充電用コードを接続した AC アダプタにバッテリーコントローラーⅡを接続する。
- ・充電されたバッテリーコントローラーⅡをコードレスヘッドライトに装着する。
- ・バッテリーコントローラーⅡの横にあるスイッチを押すことにより ON/OFF を行う。
(スイッチの反対側も押さえながら、スイッチを押す)
- ・インジケータライトにより電源の残量が確認できる。
緑:95~100% 青:95~70% 赤:70%以下
- ・約 2 時間の連続使用した場合、温度制御機能が作動し、照度が下がる。

【使用上の注意】

- ・本製品を点灯させた状態の光を直視しないこと。
- ・本製品は経時変化や使用方法により、ネジの緩みや脱落、破断、変形、収縮などを起こす場合があるため、使用前には必ず緩み、異常、傷、汚れなどを点検し、安全を確認すること。
- ・水洗、浸水、薬液浸漬は行わないこと。
- ・本製品は改造等を行わないこと。
- ・充電を行う際には、故障の原因となるので、必ず付属の専用 AC アダプターを使用すること。

【保管方法及び有効期間】

- ・本製品は清掃したのちにケースへ収納し、火気や水気がなく落下しない安全な場所に保管すること。
- ・極端に温度や湿度の高い場所を避けて保管すること。
- ・ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気による悪影響を受ける恐れのない場所に保管すること。
- ・傾斜のないまたは振動、衝撃などがかからない場所に安定状態にて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

本製品を適切に使用する限り 1 年間保証、但し下記の消耗品は 1 年保証の対象外となる。

遮光ライトフィルター

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

ソンヤンインターナショナル社(台湾)

(英名) SONG YOUNG INTERNATIONAL CO.