

# インストゥルメントサマーセール **TASK** SINCE1968

JAPAN DENTAL SUPPLY 株式会社日本歯科商社 期間:2024.7.22~2024.9.20

○プールドコンタクトゲージ  
価格:各¥8,000



○コンタクトゲージ  
セット(ホルダー/ゲージ30µm×2枚/50µm×2枚/100µm×1枚)  
価格:¥25,000

○コンタクトゲージホルダー  
価格:¥16,500



○インレーリムーバー  
セット(本体/ポイント#1・2 各1本)  
価格:¥14,400



インレーリムーバー本体 標準価格:¥7,000

○テンポラリー クラウンリムーバー 富井式  
TYPE I ショート  
価格:¥21,000



●下記のQRコードより、症例動画をご覧いただけます。



TYPE I ショート (ブリッジ) TYPE I ショート (ブリッジ前歯)



- ①可動式の支点の位置を軸になる歯の真下に調整し、マージン部に爪型の作業部を挿入します。
- ②支点を指で軽く押えて固定し、ハンドルをゆっくりと振り込みます。
- ③デンポラリーークラウンが浮き上がってくるので、確実に脱落したことを確認して除去します。

〈使用方法・使用上の注意〉

- 力を加減しながらゆっくりと撤去を行ってください。
- セラミックやレジンなどのクラウンは、マージン部等の薄い部分に過度に力を加えると破損する恐れがあります。
- 支台歯を傷つけないように、可動式の先端部を当てる角度を調整してください。

○メスホルダー セーフティ タイプII 一般的名称: ナイフハンドル 医療機器分類: 一般医療機器 医療機器届出番号: 09B2X00010Y00054  
価格: ¥22,000



〈使用方法〉



ハンドル後部のトリガーを作業部のメス刃方向へ押し込みます。メス刃が押し上げられ、ワンタッチで脱落します。

- メス刃に触れることなくワンタッチでメス刃を外すことができます。
- ケガの防止や感染防止に有効です。
- 清掃性を高めるために3つのパーツに分解できる構造です。

※表示価格は令和6年7月現在のものです。  
※価格は希望医療価格です(価格に消費税は含まれておりません)。  
※表示の全長は製品と若干異なる場合があります。  
※デザイン・仕様を予告なく変更する場合があります。  
※商品写真は印刷の関係上、色味が製品と異なる場合があります。


○片頭エキスプローラー (丸柄) 一般的名称: 歯科用探針 医療機器分類: 一般医療機器 医療機器届出番号: 09B2X00010000001  
価格: 各¥1,500 ※5本入 (#9のみ) 価格: ¥7,250



○両頭エキスカーベーター (角柄) 一般的名称: 歯科用エキスカーベータ 医療機器分類: 一般医療機器 医療機器届出番号: 09B2X00010000006  
価格: 各¥3,750 ※5本入 (#65-66のみ) 価格: ¥18,250



○片頭ペリオプローブ 一般的名称: 歯周ポケットプローブ 医療機器分類: 一般医療機器 医療機器届出番号: 09B2X00010000200  
価格: 各¥4,600

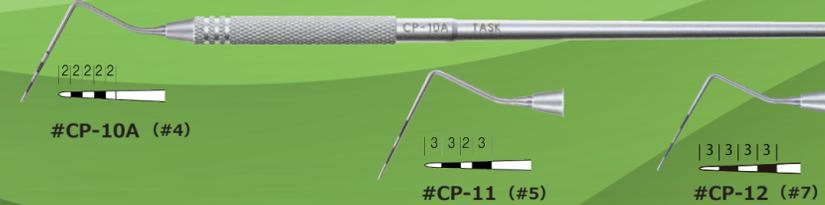

○コーク型 (上顎用) #NC (ノンカーボン) 一般的名称: 歯科治療用ピンセット 医療機器分類: 一般医療機器 医療機器届出番号: 09B2X00010000302  
価格: ¥3,400 ※5本入 価格: ¥16,500



○根管充填用ピンセット 一般的名称: 歯科治療用ピンセット 医療機器分類: 一般医療機器 医療機器届出番号: 09B2X00010000017  
価格: 各¥6,800



＜お問い合わせ＞



株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪府浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

【製造販売元】株式会社シオダ

＜ご用命は＞

**○ダイヤモンド乳歯鉗子** 一般的名称：抜歯用鉗子 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000045  
 価格：各 ¥30,000

使用部位

	乳白歯		残根	
上顎	#10S	#4	#69	
下顎	#27			



#4 上顎兼用乳白歯 全長：135mm

#10S 上顎乳白歯 全長：138mm

#27 上顎乳白歯 全長：127mm

#69 上下顎兼用残根 全長：135mm

**○ヘーベル鉗子** 一般的名称：歯科用エレベータ 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X000100000382  
 価格：¥85,000

- 器具をもちかえることなく『脱臼』と『抜歯』ができます。
- 浮いた残根をそのまま掴むことができます。
- 先端ヘーベル部は交換可能です。



全長：155mm

■使用方法



①ヘーベル側で脱臼します。②浮いた残根を鉗子側で掴みます。③そのまま抜歯します。



**○ヤングプライヤー** 一般的名称：歯科技工用鉗子 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X000100000324  
 価格：¥12,000



#74 全長：約125mm

**○三菱プライヤー** 一般的名称：歯科技工用鉗子 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X00010000092  
 価格：各 ¥12,000



#200 (大) 全長：約137mm



#200S (小) 全長：約123mm

**○骨鉗子 ミニ** 一般的名称：歯科用骨鉗子 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X000100000046  
 価格：¥38,000



#2 (曲)

全長：150mm

**○クランプ鉗子** 一般的名称：歯科用ラバーダムクランプ鉗子 医療機器分類：一般医療機器 医療機器届出番号：09B2X000100000024  
 価格：¥19,000



ストック型

全長：170mm