

歯科材料(09) 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## 研磨ペースト

### 【形状・構造及び原理等】(\*\*)

- ・形状、型式(\*)                      オーダーナンバー
- ・サファイア・・・・・・・・・・515-0000



- ・ユニバーサル ページュ・・・・・・・・513-1000



- ・主成分：酸化クロム、シリカ、アルミナ質研削材
- ・サファイア：プレシヤスメタル 仕上げ用
- ・ユニバーサル：ページュ：レジン床 仕上げ用
- ・原理：ブラシ、パフ、フェルトホイール等に付け補綴物を研磨するのに使用する。(\*)

### 【使用目的又は効果】(\*\*)

- ・補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。(\*)

### 【使用方法等】(\*\*)

- ・ブラシ、パフ、フェルトホイール等に付ける。
- ・本製品をつけたブラシ、パフ、フェルトホイール等を歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転装置に装備し回転させ断続的に押し付けて研磨する。

### 【使用上の注意】(\*\*)

- ・目を保護するために保護メガネ等を使用すること。
- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所集塵装置、公的機関が認知した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本製品により研削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(\*)
- ・他の製品と混用しないこと。(\*)

### 【保管方法及び有効期間等】(\*\*)

- ・室温保管すること。
- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。(\*)
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(\*\*)

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
レンフェルト社(ドイツ)  
(英名)RENFERT GmbH