

器具器械 6 5 歯科用充填器

一般医療機器 歯科用根管プラグ JMDN41876000

3Mix-MP法用 3-2キャリアー

警告

本商品は、**歯科診療・歯科治療以外・使用目的以外には使用しないこと。歯科医療有資格者以外は使用しないこと。器具の変形や改造はしないこと。器具を落下させないこと。強い衝撃を与えないこと。劣化や異常が見られたら器具の使用を中止すること。**

ステンレスの使用：素材のステンレスは鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使用方法、環境により腐食（錆び）することがある。

禁忌・禁止

1. 二次加工の禁止：折損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、刻印等の二次加工は絶対に行わないこと。
2. 家庭用洗剤の使用禁止：家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。洗剤には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
3. 機能水の使用禁止：超酸化水等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
4. 加熱不飽和ガス滅菌器による滅菌禁止：金属を腐食させるので、化学ガスを用いたオートクレーブ滅菌器を使用しない
5. 洗浄・消毒・滅菌上の注意：
 - ★ 次の薬剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。（次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキジン）
 - ★ 薬液消毒を行う時は、薬剤の添加文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - ★ 使用後は、防鋼洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ★ 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すること、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
 - ★ 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥により、器具の変質または変色をきたすことがある。
 - ★ 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、シミ等の原因となることがある。
6. 磨き粉、金属ウール・金ブラシ使用の禁止：腐食（錆び）の原因になるので洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

3Mix-MP法用 3-2キャリアー：#小・#小

先端部は部位にあわせて適した形状になっている。

成分：先端部ステンレス

ハンドル部真鍮

【使用目的、効能又は効果】

本品は3Mix-MP法におけるSave Pulp療法及びNIET療法を効果的かつ効率的に行う専用インストゥルメントです。

【品目仕様等】

- #大：ハンドル部(118mm) 作業部玉側(27.5mm)
作業部パイプ側(27.5mm)
- #小：ハンドル部(118mm) 作業部玉側(20mm)
作業部パイプ側(27.5mm)

【操作方法又は使用方法等】

部位により先端の形状が適したタイプを使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

本機器は、人体組織を傷めない繊細な診療に使用することを目的としているので、先端に過大な圧をかけずに使用すること。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：使用前・使用後にハンドル部、テーパ部、先端作業部に破損、ヒビ、キズ及び腐食等がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【包装】

3Mix-MP法用 3-2キャリアー：1本入り

3Mix-MP法用 3-2キャリアー：

2本入り（#大・#小・2本セット）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社インズカ

住所：〒342-0044

埼玉県吉川市木売新田字大場川道上411-3

電話番号：048-981-2850

FAX：048-981-6829

製造業者：株式会社インズカ