

歯科材料(09) 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## バイソンプラシ

### 【形状・構造及び原理等】(\*\*)

・形状、型式                      オーダーナンバー

18mm 25 本入                      766-1000

18mm 100 本入                      766-1100

直径 18mm

最大回転数 15,000min<sup>-1</sup>

シャフト直径 2.35mm

・原理:歯科用ハンドピースに装着し、補綴物の研磨を行うために使用する。

### 【使用目的又は効果】

・補綴物等の研磨に用いる器材をいう。

### 【使用方法等】

・歯科用ハンドピースに装着し回転させ、補綴物にブラシ部をあてて研磨する。(レーズには使用できない)

### 【使用上の注意】

- ・本製品は、ハンドピースメーカーの指示に従って、ブラシを確実に装着し、使用中にブラシが外れないように注意すること。
- ・使用前に回転させて振れがないことを確認すること。
- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・錆び、損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- ・目を保護するために保護メガネなどを使用すること。
- ・最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・本製品により研削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

レンフェルト社(ドイツ)

(英名) RENFERT GmbH