

器 65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 JMDN38782000

## エレファント C-R シリンジチップ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止、併用禁忌】 ・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状



##### 2. 原理

本材は、市販のC-Rシリンジの先端に取り付けて使用する充填用半透明チューブで、残量がわかりやすく、無駄のない必要量でスピーディーに充填を行うことができる。

#### 【使用目的、効能又は効果】

##### 1. 使用目的

複合レジン充填材及びセメントを窩洞に輸送する際に、市販のC-Rシリンジの先端抽出口に装着して用いる。

##### 2. 効能又は効果

- 1) ペースト状、ジェル状の充填材料を形成部位に無駄なく、スピーディーに注入できる。
- 2) 気泡の入らないセメント合着ができる。
- 3) 既製のポストを挿入後、そのまま直接コアの築造へと移行できるので、連続した作業が行える。

#### 【品目仕様等】

##### 1. 性能

- 1) コンポジット充填が的確で緊密に行える。
- 2) 必要量のコンポジットを練和するだけでよく、極めて経済的である。
- 3) チューブは半透明なので、残量が一目でわかる。

##### 2. 仕様

材質 : チューブ / ポリプロピレン

: プラグ / ラバー製

色 : チューブ / 半透明

: プラグ / グレー

#### 【操作方法又は使用方法等】

##### 1. 使用方法

- 1) チューブの後方口から、充填する材料をチューブの半分位まで入れプラグで蓋をする。
- 2) 余分な材料は拭き取る。
- 3) CRシリンジのプランジャーを後ろに引き、シリンジ先端開口部にチューブを取り付ける。
- 4) ゆっくり一定の力で充填材料を押し出し、形成部位に充填する。

#### 【使用上の注意】

- 1) 本材は使い捨てなので、患者毎に取り換えること。
- 2) 本材に傷や材質の劣化及び汚損等がある場合は使用しないこと。
- 3) チューブの半分以上に材料を充填しないこと。
- 4) チューブ・プラグには、アルコール及び、薬液は使用しないこと。

5) 本材は、本文【使用目的、効能又は効果】の項に記載の使用用途以外に使用しないこと。

6) 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

##### 1. 貯蔵・保管方法

- 1) 本材は高温、多湿及び直射日光や水のかかるおそれのある場所を
- 2) 避けて保管すること。
- 3) 本材は室温で、外圧(物理的負荷)を受けない清潔な場所に保管すること。
- 4) 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

#### 【保守・点検に係る事項】

##### 1. 保守・点検

本材に、傷や材質の劣化及び、汚損等がないか、点検・確認を行い、該当するものは使用しないこと。

#### 【包装】

チューブ/プラグ 各 100 入

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: サンデンタル株式会社

住所: 〒542-0081

大阪市中央区南船場4丁目8番9号

TEL: (06)-6245-0950

製造業者: 塩城市塩都区林海椽望製品工場

製造所国名: 中華人民共和国