

エグザクト フォーム

低収縮率でインプラント等の精密作業模型に適しています。流動性に優れているので、簡単に練和して印象トレーに流すことが出来ます。硬化後は、石こうと同様にバーヤジスクで切削できます。

包装: 240g Aコンポーネント(20g)6缶、Bコンポーネント(20g)6缶
色調: イエロー、アイボリー、オリーブグリーン
価格 各 7,700円

一般的名称: 歯科用樹脂系模型材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010141

**光沢があって
きれいな仕上がり!**

インプラント模型に
症例サンプル模型に

弾性があって破折しにくい!

支台歯の細いケースに



1

ポリサルファイド系印象材は溶出することがあるので、必ず分離剤を使用してください。シリコンパー系には必要ありません。

2

コンポーネントAとBを別々に60秒以上、均一になるまで練和します。

3

溶液が均一になったらコンポーネントBの缶の中に、Aの全量を入れてください。

4

均一な色になるまで30秒間、混和してください。

5

流動性に優れているので、流しこみは簡単です。40gで顎(フルアーチ)1個分です。

6

30分後にトレーから取り外し、その後90分で最終硬化が完了します。硬化後はカーバイトカッターで切削できます。

7

二次埋没するときは、必ずエグザクトフォーム分離剤を使用してください。

混和比: 1:1
曲げ強度: 50MPa
ショア硬度: 80
弾性係数: 3900 MPa

エグザクトフォーム分離剤

作業模型の二次石こう時に使用する基底面の分離剤です。ポリサルファイド系印象材には必ず使用してください。

包装: 125mL(スプレータイプ)
価格 5,000円



チキソロック

- 硬化膨張率が2時間後0.08%(最大膨張点)以下で安定し、その後の経時的膨張がおこらないので、インプラントなど寸法精度にこだわるケースに適しています。
- 良好なチキソロピー性を有するとともに、作業時間は約5分と余裕があり盛付けが容易にできます。
- 人工的に製造・精製されているため、品質が一定で、硬化後のトリミングでもチップングが起こりにくく、表面も滑沢に仕上がります。

色調: ブラウン
包装: 2kg アルミ袋
価格 4,500円



物性データ

| | |
|-----------------|------|
| 混水比 (w/p) | 0.20 |
| 硬化時間 (min) | 10 |
| 圧縮強度 (1時間後MPa) | 60 |
| 圧縮強度 (24時間後MPa) | 85 |

| | | |
|------|----------|--------|
| 硬化膨張 | (2時間後%) | 0.08以下 |
| | (48時間後%) | 0.08以下 |

※試験方法DIN EN ISO 26873による。

チキソロピー性とは

外圧(振動など)が加わると流動性が増大し、外圧なしの状態では静置する性質です。

一般的名称: 歯科用硬質石こう
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010137

ジンジバルマスク

NEW



Aesthetic

審美性に優れた歯肉形態を再現できます。

Informative

歯頸部のカントアを歯肉に合わせることができ、オーバーカントアを防ぎます。

Efficient



カートリッジからの注入方式のため正確で簡単、しかも経済的です。

カートリッジからの注入方式により、正確な歯肉形態を再現できます。適度な粘性を持ち、専用のシリコンバーで簡単に切削できます。ガムラインのチェックなど、高い審美性を要求される補綴物の製作に役立ちます。



別売:

| | | |
|--------------|--------|---------------|
| カートリッジ(50mL) | 価格 1個 | 6,500円 |
| ミキシングチップ | 価格 12本 | 3,500円 |
| 分離材(10mL) | 価格 1個 | 2,000円 |

マルチシルドリングデバイス
カートリッジタイプ専用のディスペンサーです。
価格 1個 **19,000円**



一般的名称: 歯科用樹脂系模型材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010352

一般的名称: 歯科用練成器具
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010191

コンパクト ラボパテ

テック製作・流し込みレジン・歯肉再現法などのコア材として使用できます。硬化収縮による変形も少なく、精度に優れています。

| | | |
|-------------|----|----------------|
| 8kgセット | 価格 | 48,000円 |
| 1kgセット | 価格 | 6,800円 |
| キャタリスト 35mL | 価格 | 2,200円 |



一般的名称: 歯科用樹脂系模型材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X101040060076

シリコンバー

柔らかいリライニングレジンやマウスガードなどのシリコン材料を簡単に研削でき、表面もスムーズに仕上がります。

| | | |
|---------|-------|---------------|
| S187-23 | 価格 1本 | 5,200円 |
| S263-60 | 価格 1本 | 8,000円 |
| S237-65 | 価格 1本 | 8,000円 |



一般的名称: 歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010055

マトリックドリル

低速で確実にコア用シリコンなどに穿孔できます。また、大型ブレード刃によりシリコンなどを破損することなくシャープできれいな穿孔が可能です。

価格 1本 **10,000円**
販売終了



一般的名称: 歯科技工用スチール切削器具
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010065

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ 製造販売元



株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は