

歯科材料(08) 歯科用石こう及び石こう製品  
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN34811000

## エグザクトフォーム

### 【形状・構造及び原理等】

形状、型式	オーダーナンバー	
アイボリー	240 g	520 2028 2
オリーブグリーン	240 g	520 2028 0
イエロー	240 g	520 2028 4
アイボリー	600 g	520 0028 2
オリーブグリーン	600 g	520 0028 0
イエロー	600 g	520 0028 4
グレー	600 g	520 0028 3
ブルー	600 g	520 0028 1
アイボリー	40 g	

構成名	性状	成分
コンポーネントA	液状	アルキルアミノポリ(オキシアルキレン)アルコール
コンポーネントB	液状	ジフェニルメタン、ジソシアン酸エステル

・原理：技工用シリコン印象材、テック製作・流し込みレジン・歯肉再現法などのコア材として使用できる。

### 【使用目的又は効果】

・歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる各種高分子からなる材料をいう。

### 【使用方法等】

・コンポーネントA/コンポーネントBはベース材/硬化材でそれぞれ1:1の割合で混合し、模型材等に用いる。




コンポーネント A・B は各々均一になるまで混和する。



コンポーネント B に A を注ぐ。



均一の色になるまで攪拌する。(目安は30秒間)

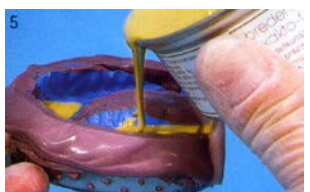

混ぜ合わせたものを印象材に直接注ぐ。



30分後に材料を取り出せる。  
90分後に材料は最終の硬度に達する。その後トリミング等を行う。

### 【使用上の注意】

- ・保存する場合は、別々の密閉した容器にうつし、冷蔵保存を行うこと。保存期間は5日以内とすること。
- ・換気の充分な室内で使用し、火気の近くでは使用しないこと。
- ・ディスポーザブルタイプのゴム手袋を使用して作業をすること。
- ・皮膚に付着した場合は、流水下で石鹸、ブラシを使ってこすり落とすこと。
- ・ポリサルファイド系、又はポリエーテルラバー系の印象材で使用する場合は必ず専用分離材を使用すること。
- ・変形の原因になるのでプレッシャーポット内で硬化させないこと。
- ・操作時間や硬化時間は気温により若干の時間に違いがあり、気温が高くなると硬化が早く、気温が低いと硬化が遅くなるので注意すること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合はすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・保管は常温(15℃~25℃)で保管し、開函後は冷暗所に保管する。(5日以内)
- ・本製品は歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
プレーデント社(ドイツ)  
(英名)breident GmbH & Co. KG