

G2

ジーツーコンセプト
Concept

 **SCHICK**
Dentalgeräte

Security
Cleanliness
Comfort
Design

エルゴノミクス、
未来的なデザイン

センサーテクノロジー採用
(2カ所による安全装置)

ボールベアリング搭載の
直結駆動モーター

モデルホルダー
不要



G2-Conceptは、支台歯のマーヅンを損傷することなく、
安全で正確に模型の分割ができます。

ジスクが下から出てくるので、ダウエルピンと平行で精密な
模型分割を可能にします。



G2 Concept

- 両手によるセンサーシステムで安全に作業ができます。
- レーザーラインマーカで分割ラインを確認できます。
- ジスクがテーブルから垂直に出てくるので、ダウエルピンと並行に分割できます。
- 下から分割されるので、モデルホルダーが不要です。
- 集塵ホースを接続して粉塵をきれいに除去できます。

STEP 使用方法



1.

センサー位置を確認。



2.

センサー部に手首の内側を接触させます。



3.

ダウエルピンを植立した模型を両手で押さえます。



4.

レーザーマーカで分割位置を確認し、テーブルを下げます。



5.

自動でジスクが回転して分割します。



隣在歯とのスペースが狭い場合


上からハンドソー等でガイドを入れておいてから、マージン付近約1mmまでジスクを入れて分割します。

G2コンセプト

幅×高さ×奥行	375 mm×160 mm×390 mm
重量	4.5 kg
電圧	230 V/115V/100V
周波数	50 / 60 Hz
電力	80 W
回転数	7.500 rpm

ダイヤモンドジスク

ダイヤモンドジスク	φ85 × 20 mm
厚さ	0.3 mm
分割可能サイズ	26.5mm (推奨ダウエルピンサイズ 14.0mm以下) ※長さ17.0mmのダウエルピンは分割できない場合があります。

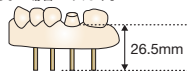

ダイヤモンドジスク替刃 110,000 円

G2コンセプト モデルソーセット

本体1台(レーザーラインマーカ付属)、ダイヤモンドジスク1枚

価格 940,000円

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ 販売元



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は