

使い捨てでいつでも清潔。院内の感染予防に！

# JDSエプロンドレープ

特許取得  
済み


## 歯科用 ディスポーザブルエプロン + ドレープが一体化！

今までになかった、歯科用ディスポーザブルエプロンとドレープが一体化した製品です。使い捨てでいつでも清潔、感染防止に有効的です。小外科などにも便利！

吸水性のある表面

防水加工の裏面

表面は吸水性があり、裏面は防水加工で患者さんの顔と衣服を水しぶきや切削片から保護します

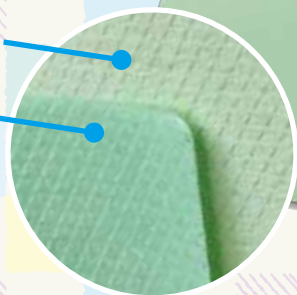

ドレープが患者さんの目を覆い緊張をほぐします

### 使用方法


ドレープ使用時は開口部の切れ込みを鼻にかけ、オトガイ部を出すように装着することで位置がズレません。洗口時はドレープ部分を折り返すだけ！

#### ドレープ使用時

①切り込み部分を鼻にかけます

切り込み部  
開口部

②オトガイは外にできるようにします

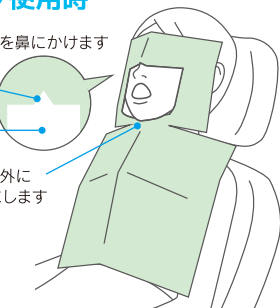

#### 洗口時

ドレープ部分を折り返します



※開口量が大きく鼻に掛かりづらい患者さんには、一度お顔から外し鼻の切れ込み部分をハサミ等で切りサイズを調整してください



JDSエプロンドレープ  
希望医院価格 2,200円

入り数 1箱 100枚入り  
カラー グリーン  
サイズ W460×H580mm

### モニタリングされた先生のお話 (東京都開業医)

今迄、診療に使用しクリーニングしただけのタオルを、患者さんのお顔に掛けても良いのだろうか悩んでいました。しかし一般診療用のシールなしディスポドレープは、位置がすぐにずれてしまったり値段が高いので、なかなか使用するのが難しいと感じていました。

しかしJDSエプロンドレープは、シールがなくても位置がずれず、コストも歯科用エプロンと変わりません。エプロンとドレープ両方の機能を併せ持つ分、コストパフォーマンスも良好です。そして何より患者さんに安心をアピールできます。

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

販売元



## 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は