

歯科材料 (01) 歯科用金属  
管理医療機器 歯科非製造用チタン合金 JMDN コード：70795000  
JDS チタンディスク 2種

**【禁忌・禁止】**

本品の類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】**

形状：ディスク状

直径：98mm

厚み：10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm  
20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 26mm

成分

成分	含有量(%wt)
	純チタン(2種)
チタン	残部
鉄	0.30以下
炭素	0.08以下
窒素	0.03以下
酸素	0.25以下
水素	0.015以下
その他	0.40以下
合計	100.0

**【使用目的又は効果】**

歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。ただし、歯科用インプラント又は歯科用インプラントアバットメントの作製に用いるものを除く。

**【使用方法等】**

- 1) 本品を歯科技工用CAM機に固定し、加工を開始する。  
※歯科技工用CAM機の使用法などは、CAM機に付属の添付文書及び使用説明書等を参照すること。
- 2) 加工した歯冠修復物、補綴物又は支台装置等を、適切なバー等を使用して切り出す。
- 3) 通法に従って形態修正・研磨を行う。

**【使用方法に関連する使用上の注意】**

本品に油分・ほこりなどが付着している場合には、きれいに拭き取ってから使用すること。

**【使用上の注意】****【使用注意】**

- 1) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
- 2) 本品の切削、研磨の際には、目の損傷を防ぐために保護メガネなどを使用すること。
- 3) 本品、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、使用の際に直接皮膚に触れないように保護具を着用すること。

**【重要な基本注意】**

- 1) 本品、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 3) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は本品を使用しないこと。また過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

**【保管方法及び有効期間等】****【保管方法】**

- 1) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
- 2) 埃、塩分、水分を多く含んだ空気による悪影響を生ずる恐れのない場所、及び外圧のかからない場所に保管すること。
- 3) 本品は、品質保持のため高温・多湿・直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者  
第一種医療機器製造販売業  
株式会社 DentalBank  
福岡県大野城市大池 2-26-1  
092-513-3280

販売業者  
株式会社 日本歯科商社  
東京都墨田区石原 1-19-5  
03-3625-3111