

歯科材料 (01) 歯科用金属
管理医療機器 歯科非製造用チタン合金 JMDN コード：70795000
JDS チタンディスク 4種

【禁忌・禁止】

本品の類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

***【形状、構造及び原理等】**

形状：ディスク状

直径：98mm

厚み：10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm
20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 26mm

成分	含有量(%wt)
	純チタン (ASTM F67 準拠：Gr. 4)
チタン	残部
鉄	0.5
その他	1.0 以下
合計	100.0

【使用目的又は効果】

歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科技工用 CAM 機に固定し、加工を開始する。
※歯科技工用 CAM 機の使用方法などは、CAM 機に付属の添付文書及び使用説明書等を参照すること。
- 2) 加工した歯冠修復物、補綴物又は支台装置等を、適切なバー等を使用して切り出す。
- 3) 通法に従って形態修正・研磨を行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]

本品に油分・ほこりなどが付着している場合には、きれいに拭き取ってから使用すること。

【使用上の注意】

[使用注意]

- 1) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
- 2) 本品の切削、研磨の際には、目の損傷を防ぐために保護めがねなどを使用すること。
- 3) 本品、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、使用の際に直接皮膚に触れないように保護具を着用すること。

[重要な基本注意]

- 1) 本品、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 3) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は本品を使用しないこと。また過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
- 2) 埃、塩分、水分を多く含んだ空気による悪影響を生ずる恐れのない場所、及び外圧のかからない場所に保管すること。
- 3) 本品は、品質保持のため高温・多湿・直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
第一種医療機器製造販売業
株式会社 DentalBank
092-513-3280

販売業者
株式会社 日本歯科商社
東京都墨田区石原 1-19-5
03-3625-3111