

歯科材料(07) 歯科用ワックス
 一般医療機器 歯科用パラフィンワックス JMDN70893000

JDSパラフィンワックス

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・溶解された本材を直接人体に使用しないこと。

【使用目的又は効果】

- ・義歯の仮床、人工歯の排列、ロウ堤作製に用いる。

【形状・構造及び原理等】

- ・形状：板状
- ・サイズ：

種類	厚さ	大きさ
レギュラーサイズ	1.4 mm	146×74 mm

- ・内容量：1kg/箱
- ・主成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、ミツロウ、カルナバワックス、色素等

【物理的性質】

加圧短縮率（%）

温度	短縮率（%）
21℃	2.0%未満
37℃	3.0%未満
45℃	50.0%未満

【使用方法等】

【義歯の仮床】

- ①本品を作業模型の大きさに合わせてカットします。
- ②本品を火炎等で適度に軟化し、作業模型に圧接します。
- ③過不足部分を削除又は追加し、形状を整えます。

【人工歯の排列】

- ①本品を火炎等で適度に軟化し、巻き棒状にします。
- ②棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接します。
- ③過不足部分を削除又は追加し、形状を整えます。
- ④歯科技工の通法に従い、人工歯を排列します。

【ロウ堤の作製】

- ①本品を火炎等で適度に軟化し、巻き棒状にします。
- ②棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接します。
- ③過不足部分を削除又は追加し、形状を整えます。

【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・本品は鋳造用ロウ型作製以外の目的に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・室温保管
- ・本品を高温の場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に保管しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火設備を備えること。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
 株式会社 日本歯科商社

製造業者
 クエストデンタルマテリアル社（フィリピン）
 英名 Quest Dental Material Corporation