

器 65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 JMDN38782000

再使用禁止


## JDSユニチップ

### 【禁忌・禁止、併用禁忌】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

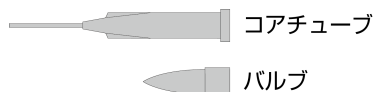

#### 2. 原理

本材は、専用のCRシリンジの先端に取り付ける充填用透明チューブで、残量がわかりやすく、先端の細い針状の管を通して、根管の深部や細部の充填が無駄なくスピーディーに行える。

#### 3. 仕様

材質: コアチューブ/ポリプロピレン  
バルブ/プラスチック  
ノズル/アルミ合金製  
色調: コアチューブ/透明  
バルブ/緑

### 【使用目的又は効果】

#### 1. 使用目的

根管充填用で、専用のCRシリンジの先端抽出口に装着して使用する。

#### 2. 効果

- (ア) ペースト状、ジェル状の材料を充填部位に無駄なく、スピーディーに注入できる。
- (イ) 気泡の入らないセメント合着ができる。
- (ウ) 既製のポストを挿入後、そのまま直接コアの築造へと移行できるので、連続した作業が行える。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用方法

- 1) コアチューブの後方から、充填する材料をコアチューブの半分位まで入れバルブで蓋をする。
- 2) 余分な材料は拭き取る。
- 3) CRシリンジのプランジャーを後ろに引き、シリンジ先端開口部にコアチューブを取り付ける。
- 4) ゆっくり一定の力で充填材料を押し出し、形成部位に充填する。

### 【使用上の注意】

- 1. 本材は単回使用商品であり、患者毎に取り換えること。
- 2. 本材に傷や材質の劣化及び汚損等がある場合は使用しないこと。
- 3. コアチューブの半分以上に材料を充填しないこと。
- 4. コアチューブ・バルブには、アルコール及び、薬液は使用しないこと。
- 5. 針部がしっかりコアチューブから出ている状態で使用すること。
- 6. 針部がコアチューブに部分的に・もしくは完全に入っている場合は、針部とコアチューブを持ち引っ張るか、コアチューブの中から針軸部を押して使用すること。
- 7. 本材は、本文【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

- 1) 本材は高温、多湿及び直射日光や水のかかる恐れのある場所を避けて保管すること。
- 2) 本材は室温で、外圧(物理的負荷)を受けない清潔な場所に保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 保守・点検

本材に、傷や材質の劣化及び、汚損等がないか、点検・確認を行い、該当するものは使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: サンデンタル株式会社  
製造業者: 塩城市塩都区林海橡望製品工場  
製造所国名: 中華人民共和国