

遠赤外線寒天コンディショナー  
2ステージフルオートタイプ

# JDS遠赤ウォーマー

## カートリッジタイプ



Pカートリッジ  
シリンジ付



Pカートリッジシリンジ  
一般的名称：歯科用注入器具  
医療機器分類 一般医療機器  
届出番号：11B2X00019CL1003

### JDS遠赤ウォーマー



遠赤外線の電磁波がムラのない理想的な加熱を寒天に与えます。また物性劣化を最小に抑えます。



マイコン制御により、高精度に温度をコントロールします。保存温度55℃～70℃、溶解時間1分～30分の間で変更可能



耐久性に優れ、オートクレーブにラクラク対応します。



ボタンをOFFにしている時も予約タイマー時間・溶解保持時間・保存温度等をメモリーしています。※元電源を落とした場合は、保存温度のみ保持されます。



最大60時間の予約タイマー機能により、待つことなくご使用できます。

### Pカートリッジシリンジ

JDS遠赤ウォーマー仕様 (8本フルオート×2ステージ)

寸法	W120×D150×H95mm	重量	約1.5kg
電圧	AC100V	周波数	50 / 60Hz

# JDS遠赤ウォーマー

## カートリッジタイプ



(8本フルオート×2ステージ)



JDS遠赤ウォーマー本体  
+  
Pカートリッジシリンジ付

価格：95,000円




価格：89,000円 (Pカートリッジシリンジ無し)

- ▶ 各ステージ(寒天槽)専用のデジタル表示があり、使用状況が一目瞭然。
- ▶ 操作パネルも各ステージ専用であり、隣の槽を誤操作してしまふことがありません。
- ▶ 遠赤外線電磁波がムラのない理想的な加熱を寒天に与えます。また、物性劣化を最小に抑えます。
- ▶ マイコン制御により、精度の高い温度コントロールを実現しています。  
保存温度55℃~70℃、溶解時間1分~30分の間で変更可能。
- ▶ 最大60時間の予約タイマー機能により、待つことなくご使用できます。

一般的名称：一般医療機器  
医療機器分類 歯科材料加温器  
届出番号：11B2X00019JDS001

### かんたん操作

※詳しくは使用説明書をご覧ください。

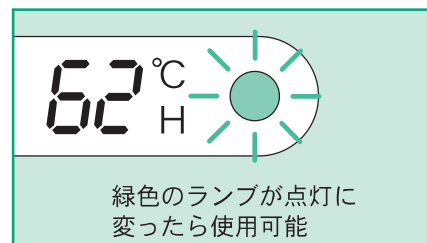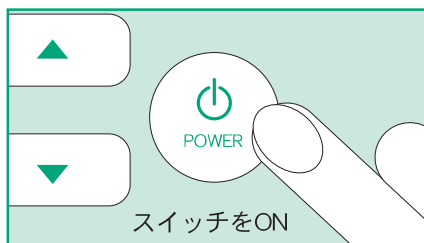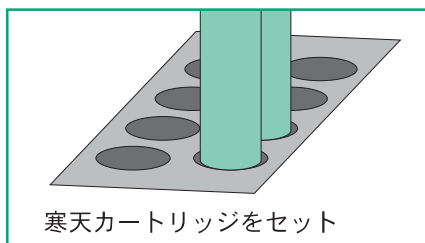

### 数値表示部

温度や時間を表示します  
設定中は点滅します

### 赤色ランプ

寒天が使用不能の状態をお知らせします

### タイマーボタン

予約タイマー運転の設定や溶解保持時間の変更をするときに使用します

### アップボタン

温度や時間を設定するときに数値表示部の数値を増加させます  
溶解の中止を行うときにも使用します

### ダウンボタン

温度や時間を設定するときに数値表示部の数値を減少させます  
溶解の中止を行うときにも使用します

### 左側ステージ表示部

左側ステージの状態をお知らせします

### 緑色ランプ

寒天が使用可能な状態をお知らせします

### 右側ステージ表示部

右側ステージの状態をお知らせします

### 小数点

予約タイマーの運転をお知らせします

### ON/OFFボタン

運転の開始、終了、予約タイマー運転の解除を行うときに使用します

### 左側ステージ操作部

左側ステージの操作、設定ができます

### 右側ステージ操作部

右側ステージの操作、設定ができます

### メンテナンス

販売店やメーカーに依頼しなくても寒天槽を清掃できます。

- ①電源プラグをコンセントから抜き、本器を十分に冷ましてください。
- ②プラスドライバーでガイドカバーの止めネジを取外してください。
- ③ガイドカバーを取外し、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し、硬く絞った雑巾で拭いてください。
- ④寒天カートリッジ挿入口内の清掃は、割り箸等挿入口内壁を傷つけない材質の棒状のもので、乾燥した寒天または異物をこすり落として下さい。
- ⑤元通りに組立ててください。

製品についての詳細は  
弊社ホームページを  
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれません)。

販売元

## 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造販売元 株式会社クラーク

ご用命は



JAPAN DENTAL SUPPLY

0325TN0200