

機械器具 60 歯科用エンジン  
 一般医療機器 歯科技工用電気レーズ(70739000)  
**JDSミニレーズ**

**【形状・構造及び原理等】**

形状、構造は以下のとおり



本体寸法 : W155 × D130 × H130mm  
 重量 : 3.4kg  
 電源 : AC100-130V  
 消費電力 : 200W  
 付属品 : タケノコ(左右各1本)、取付用レンチ、コンセントソケット

**【使用目的又は効果】**

電動機を用いて補綴物を研削・研磨する装置で、低速回転のものをいう。

**【使用方法等】**

付属品のタケノコを取り付け、研磨工程にあわせて研磨用パフ、ホイール、ブラシ等を装着し、通法に従い歯科技工物、歯科補綴物を研磨する。

**[使用方法に関連する使用上の注意]**

タケノコ、研磨用ブラシ等を取り付けた後、POWERボリュームスイッチがOFFの状態になっていることを確認の上、電源コードをコンセントに接続すること。  
 POWERボリュームスイッチを回転させてON状態にし、徐々に低速回転から高速回転に上げ、回転数を調節すること。  
 回転数は7,000rpm以下で使用すること。  
 最高回転数が7,000rpm以下のブラシ、パフ等を装着の際は、そちらに従うこと。

**【使用上の注意】**

## 1) 使用上の注意

使用前に予備稼働を行い、不具合がないことを確認すること。  
 タケノコを取り付けるとき、取付用レンチでしっかりとネジを締め、外れないことを確認すること。  
 研磨を行う際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護めがね、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。  
 水の影響等により漏電する恐れがあるため、アースを取り付けてから使用すること。  
 使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。  
 故障の原因となるため、稼働中に無理な力を加えての作業や、モーターを止めることは避けること。また、使用後は本品に付着した研磨粉等を清掃すること。  
 長時間の使用により、パワーが低下した場合は電源を切り、モーターを一定時間休ませること。

## 2) 重要な基本的注意

本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。

本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

**【保管方法及び有効期間等】**

## [保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社  
 電話番号 : 0533-57-7121  
 F A X 番号 : 0533-57-1764  
 e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : Blackstone Industries LLC.  
 製造先国名 : アメリカ合衆国

発売元 : 株式会社日本歯科商社  
 住所 : 東京都墨田区石原 1-19-5  
 電話番号 : 03-3625-3111