

## JDSレストカッター

### 【形状・構造及び原理等】

- ・形状・型式:1.0mm ラジラス
- ・規格:全長 55mm  
シャンク径  $\phi$ 2.35mm  
刃径 $\phi$ 1.0mm 首径 $\phi$ 0.95mm 首下長 18mm
- ・原理:ハンドピースエンジン等に装着し、金属、プラスチック、陶材又は同種の材料を研削するために使用する。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
オーエスジー株式会社



### 外観図

### 【使用目的又は効果】

- ・タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、ワックス、プラスチック、セラミック、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具をいう。

### 【使用方法等】

- ・ハンドピースに装備、回転させ断続的に被切削物に押し付けて研削する。
- ・推奨回転数:12,000-20,000 rpm

### 【使用上の注意】(\*\*)

- ・ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ・使用前に回転させて振れがないことを確認すること。
- ・頭部の細い、長い、大きい形状のものは折れたり、曲がったりすることがあるので無理な角度、過度な加圧での使用は避けること。
- ・推奨回転数を超えて使用しないこと。
- ・錆び、損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- ・目を保護するために保護メガネ等を使用すること。
- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認知した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本製品により研削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。