

歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器 歯科セラミックス用着色材料 (70823000)

ネオ ステイン

【形状・構造及び原理等】**

1) 形状・構造

本品は、セラミックス系歯科修復物の色調調整を行うためのパウダー及びペースト陶材、パウダー陶材を練和する練和液から構成されている。

本品は、以下の陶材・練和および希釈液があり、記載の成分を含有する。

陶材	形状	主成分	
メイクアップ ネオ	ペースト	長石、二酸化ケイ素	
インノバネオ	粉末	長石、二酸化ケイ素、アルコール類	
マジックカラー	粉末	長石、二酸化ケイ素	
練和及び希釈液		形状	主成分
メイクアップネオフルード インノバネオフルード リコンディショナーフルード マジックカラーリキッドGL	液体	アルコール類	
マジックカラースペシャルリキッドML	液体	水、アルコール類	

2) 原理

陶材粉末、ペーストを練和及び希釈液で練和し、セラミックス系修復物に塗布し、焼成することにより色調調整を行う。

【1】陶材

項目	規格
外観	異物の混入がないこと。

【2】練和液

項目	規格
外観	異物の混入がないこと。

【使用目的又は効果】

セラミックス系歯科修復物の色調調整に用いる。

【使用方法等】*

陶材粉末、ペーストを練和液で練和し、セラミックス系歯科修復物に塗布し、歯科技工用ポーセレン焼成炉で焼成する。本品の練和物を塗布するほか、各母材の粉末に本品を適量混合することも可能である。

本品の適用及び焼成は、使用する母材の説明書に従う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ペーストは使用前にプラスチック製のスパチュラで攪拌すること。保管期間が長くなっている場合は、ペーストオペクリキッドを加えて、元の稠度にもどすこと。
- ペーストの容器は、使用后すぐに蓋をすること。

【使用上の注意】*

1) 使用注意

- 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認知した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 本品の切削・研磨作業などの際には、粉塵により人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認知したマスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 本品の切削・研磨の際には、目の損傷を防ぐために保護メガネなどを使用すること。
- 患者への装着の際には、ラバーダムを使用すること。
- 患者への装着の際には、適切なセメント材（レジンセメントなど）を用いて装着すること。
- 他の製品と混合しないこと。

2) 重要な基本的注意

- 本品（パウダー、ペースト、液）および練和物は、目に入らないように注意すること。万一、目に入った時には、すぐに多量の流水で洗浄し、医師の診断を受けること。
- 患者への装着の際には良く洗浄し、汚染物質を除去すること。

【保管方法及び有効期間等】*

【保管方法】

- 本品のペースト、練和液は、高温場所での保管、蓋をとったままの保管は避けること。
- 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社日本歯科商社

製造元：クレマ社（オーストリア共和国）
KLEMA Dentalprodukte GmbH

発売元：株式会社日本歯科商社

使用説明書を必ずご参照ください。