


歯科器具(25) 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN31776000
OK ブローアー ミラーキット

【形状・構造及び原理等】

外観

[全体]

ブローアー本体

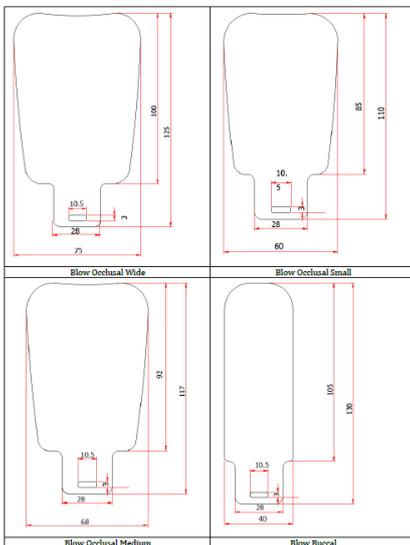

[ミラー]
・ワイド
・ミディアム
・スモール
・バツカル(オプション)

原材料

本体：ABS 樹脂

ミラー：ステンレススチール

包装

セット：本体、充電用 USB ケーブル（タイプC）、ミラー三種（ワイド・ミディアム・スモール）

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

- ・ミラー両面のスリーブを剥がさずこと。
- ・仕様する前にミラーが滅菌済であることを確認すること。
(ミラーのみオートクレーブ滅菌可)

本体裏側にあるスロットにミラーを差し込む。

適宜、「送風」、「ライト」の操作を行う。

使用後は本体背面のボタンを押しながら、ミラーを抜いてください。

適時、付属の USB ケーブルで本体を充電してください。

【使用上の注意】

使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。

使用前に傷、バリ等がないか確認し、口腔内を傷つける可能性がある場合には使用しないこと。

器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテグを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

形態変更や改造などはしないこと。

劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

粉塵や化学製品を避け、清潔で乾燥した場所に保管すること。

「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。

保管中、損傷しないように注意すること。

外圧（物理的負荷、振動、衝撃）及び、落下の危険がない安定した場所に保管すること。

ガラス鏡面を保護するため、他のインスツルメントとの接触を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

洗浄・滅菌について[洗浄]

・使用後は歯科用防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

・超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

・クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

[滅菌]

・ミラーのみオートクレーブ滅菌可。

・乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

Jaintek Co., Ltd.（大韓民国）