

オクルージョンスプレー


OCCLUTEK SPRAY

オクルテック
スプレー

金属床やクラウン、インレー内面の接触箇所を
チェックする速乾性パウダースプレー



Features

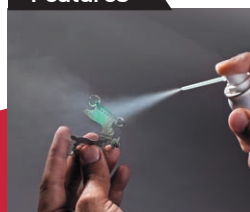


微細な粒子で均一に噴霧



スチームクリーナーで
容易に洗浄

Color

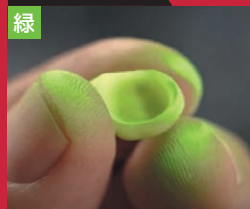

選べる2色のカラー



オクルテックスプレー

カラー	緑 1935-2000 / 赤 1935-3000
容量	75mL
価格	各2,300円

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

How to use

使用する前に必ず缶を逆さにして
60秒振ってください(150回程度)。
スプレーノズルは垂直方向に少しの
圧力でスプレーしてください。
対象物から**3~5cm**離して、
1秒くらいを目安にスプレーしてください。

使用方法
Movie



製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください

<https://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ [販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は