

一般医療機器

機械器具 47 注射針及び穿刺針  
歯科用貼薬針 JMDN コード: 70679000

## PPS キャリア

## 【禁忌・禁止】

## ＜使用方法＞

- (1) 本品を変形させたり切削したりする等の加工・改造は行わないこと。
- (2) 水分が付着したまま保管しないこと [錆びる恐れがある]。
- (3) 使用後は先端パイプ内部の薬剤を全て除去すること。[破損の恐れがあるため]

## 【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼及びアルミニウムである。



パイプ先外径: φ0.8 mm

## ＜原理等＞

先端のパイプ先に 3Mix-MP を採取し、患部まで運ぶ。PPS キャリアの先端が歯周ポケットの底部に達するように挿入し、挿入後レバーをいっぱい押し、薬材を押し出す。

## 【使用目的、効能又は効果】

歯周ポケット内の貼薬を行う器具である。

## 【品目仕様等】

傷・バリがないこと。

## 【操作方法又は使用方法等】

## 【使用方法】

- (1) 薬剤の採取
  - ・数回空打ちを繰り返し、パイプや押し出し棒にゆがみがないか確認をする。
  - ・混和した 3Mix-MP をパイプ内に充填する。その際にパイプや押し出し棒を曲げぬように十分に注意する。(いっぱいに入れると、一患部 1 回の貼薬ですむ)
- (2) 余分な薬剤の除去
  - ・キャリア先端のパイプの外側に付着している薬剤を拭き取る。
- (3) 薬剤の貼薬
  - ・キャリアの先端が歯周ポケットの底部に達するように挿入し、挿入後レバーをいっぱい押し、薬剤を押し出す。
- (4) キャリアの清掃
  - ・使用後は必ず、直ちに器具の洗浄を行い、パイプ内部の薬剤を全て除去すること。パイプ内部に薬剤が残っていると時間と共に硬化したり、そのまま使用すると器具が破損する恐れがある。3Mix-MP 用洗浄液 (別売) を使い、10 倍に希釈した洗浄液に浸漬洗浄の場合は 30 分以上、超音波洗浄の場合は 5～15 分間洗浄を行い、パイプ内部の薬剤を全て除去すること。洗浄の際には器具の扱いに充分注意すること。

## 【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) パイプ先端部、押し出し棒等は鋭利かつ大変細いので取り扱いには十分に注意する。
- (2) 使用前に各パーツに緩みなどがないように十分確認すること。
- (3) 貼薬を行う際には周辺粘膜等に十分配慮すること。
- (4) 器具の脱落は誤飲等の重大事故につながる危険性が高いので、十分に確認作業を行い注意して取り扱う。

- (5) 本品は必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認すること。口腔内を傷つける可能性がある場合には新しい物と交換する。
- (6) 本体及び各パーツが小さいので、誤飲等の事故を予防するために取扱いは十分注意をして行う。

## 【使用上の注意】

- (1) 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- (2) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- (3) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

## 【貯蔵・保管方法】

- (1) 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- (2) 本品は、汚染及び錆びを防ぐため、清潔で湿度の低い場所にて保管・管理すること。
- (3) 本品は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- (4) 一部アルミニウムを使用しているため、洗浄・滅菌の際はアルミニウムを腐食・変色させる薬液 (アルカリ系薬液等) を使用しないこと。

## 【包装】

PPS キャリア 1 本入り

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

1. 製造販売業者  
株式会社 デンテック  
〒174-0053 東京都板橋区清水町 5 3-5  
TEL: 03-3964-2011  
FAX: 03-3962-5624
2. 製造業者  
株式会社 デンテック  
〒174-0053 東京都板橋区清水町 5 3-5  
TEL: 03-3962-5621  
FAX: 03-3962-5624
3. 販売業者  
株式会社 日本歯科商社  
〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5  
TEL: 03-3625-3111  
FAX: 03-3625-1110