

レンフェルトポリッシュ

【形状、構造及び原理等】

[形状、構造]



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名) Renfert GmbH

- ・原理：ダイヤモンド粒子を含有したペーストで、ブラシ、パフ、フェルトホイール等に付け補綴物を研磨するために使用する。

【使用目的又は効果】

- ・補綴物等の研磨に用いる器材であり、ハンドピースで光沢研磨をするために使用する。

規格	適合
オールインワン 510-0100(*)	前装ポーセレン、ジルコニア、ニケイ酸リチウム、ハイブリッドセラミック、硬質レジン
ジルコニア 510-1100(*)	ジルコニア
プレスセラミックス 510-2100(*)	ニケイ酸リチウム
ハイブリッド(**) 510-3000	ハイブリッドセラミック

【使用方法等】

- ・本製品をブラシ、パフ、フェルトホイール等に付け、ハンドピースに装着し、回転させ断続的に被切削物に押し付けて研磨する。
- ・推奨回転数の範囲内で使用すること。
510-0100(*) : 5,000-10,000min⁻¹
510-1100(*) : 12,000-15,000min⁻¹
510-2100(*) : 10,000-12,000min⁻¹

【使用上の注意】

- ・口腔外でのみ使用すること。
- ・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・目を保護するために保護めがね等を使用すること。
- ・本製品を使用し、研磨した粉塵等が目に入ったときは、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・室温保管
- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。