

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)
ポイント


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用禁止: 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 注意事項の厳守: 器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
3. 異常時の使用禁止: 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 改造の禁止: 器具の形態変更や改造等はしないこと。
5. 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

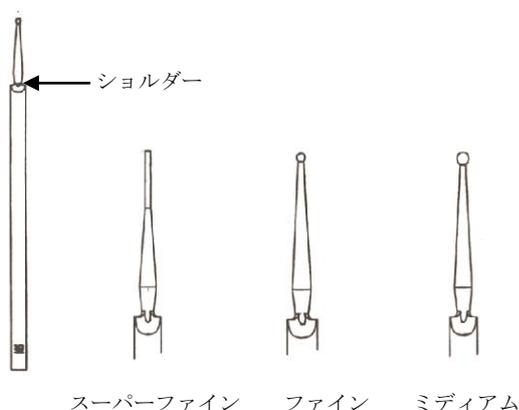

2. 材質

ポリプロピレン、ナイロン

【使用目的、効能又は効果】

1. 使用目的

本品は、口腔内で充填材又は修復材等を適用するために用いるアプリケーションである。

2. 用途

- ・シーラント、ボンディング、エッチング、ライナー、歯垢染色液等の塗布
- ・築造過剰レジンの除去

【品目仕様等】

名称	ロッド識別色	ファイバーチップ径
スーパーファイン	パープル	0.6mm
ファイン	ダークグリーン	0.9mm
ミディアム	ダークブルー	1.3mm

【操作方法又は使用方法等】

- ①使用部位、目的に合わせ、根元の部分でハンドルを曲げます。
- ②本品の先端チップに材料を浸し、所要部位に塗布します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 本品は材料ごとに使い分けてください。

【使用上の注意】

[使用注意]

1. 本品は【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

[重要な基本的注意]

1. 使用には十分注意を払うこと。
2. ショルダー部で曲げる際には、折損することがあるので、無理な角度付け、過度の加圧での使用は避けること。
3. 使用後は、感染防止等に配慮して安全な方法で処分すること。
4. 再使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

常温(但し結露しない。特に水濡れに注意すること)にて、貯蔵・保管すること。

【包装】

[単品包装]

- ・ポイント スーパーファイン 100本又は400本
- ・ポイント ファイン 100本又は400本
- ・ポイント ミディアム 100本又は400本

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売業者 株式会社エイコー
住所 東京都台東区上野 3-17-10
電話番号 03-3834-5777
製造業者 SDI Limited (SDI社)
製造国 オーストラリア

販売業者* 株式会社日本歯科商社
東京本社 東京都墨田区石原 1-19-5
TEL03-3625-3111
大阪本社 大阪市浪速区日本橋 4-3-9
TEL06-6643-0085