


サンドブラスターの砂詰まり解消方法について



砂の出が悪くなった場合、まずペン先を指で押さえ、フットスイッチを踏んで、逆噴射を行ってください。

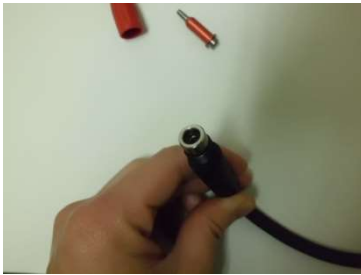

次にノズルを外し、ノズル内部につまりがないか確認してください。その後、ノズルを外したホースの先端を指で押さえ、フットペダルを踏んで、逆噴射を行ってください。

写真 A

写真 B



最後に、付属の工具(写真 A)で流入ノズル(金色のパーツ)を引き抜き、ペン先を指で押さえた後、タンク内のブルーのホースを指で押さえフットスイッチを踏み、逆噴射を行って下さい。この時、タンク内に砂が入っていると逆噴射によって砂が飛び散る場合がありますので、タンク内の砂は抜いてから逆噴射を行って下さい。また、流入ノズルは写真 B のように穴に詰まりがないか確認してください。

*上記の作業を行っても解消されない場合は一度点検修理に出して下さい。