

全自動義歯洗浄器 シンプロ専用洗浄剤

SEAMES DC シーメス DC

食品添加物を主剤とした、義歯の歯石除去剤です。
容易に除去できないプラークや石灰化した沈着物を除去します。



容量 2L
価格 5,000円



Before



After

- 本剤は、**原液～2倍希釈液**でご使用下さい。
- 洗浄後は十分に流水ですすぎながら義歯ブラシで磨いてください。

全自動義歯洗浄器

Renfert
making work easy

シンプロ 価格 167,000円

35°に傾いた洗浄槽内で、
クリーニングピンおよび洗浄液と
一緒に回転(反転)洗浄させることにより、
頑固に付着した歯石やプラークを機械的、
化学的に除去する全自動の義歯洗浄器です。



ご使用上の注意

- 本品は酸性の為、塩素系薬品・洗剤との混合は有害ガスが発生するので絶対に避けて下さい。
- 使用時は防護メガネ及びゴム手袋を着用してください。
- 眼に入った場合はこすらず直ちに流水で洗眼し医師の処置を受けて下さい。



洗浄液の廃棄について

本品は酸性ですので、排出の際は大量の水で希釈して排出するか、アルカリ性物質(非塩素系)で中和後、多くの水と共に排出して下さい。

※価格は希望小売価格です(価格には消費税は含まれておりません)。※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ



JAPAN DENTAL SUPPLY

[販売元]

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111

大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085

北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001

九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造元]

クリーンケミカル株式会社

ご用命は