

機械器具(66) 歯科用練成器
一般医療機器 歯科印象材混こう器 JMDN38790000

シンプレス

【形状・構造及び原理等】(**)

- ・形状(*)



- ・電源: AC100V 50/60Hz
- ・電源出力: 170W
- ・寸法: 幅 190mm×奥行 380mm×高さ 330mm
- ・重量: 7.0 kg
- ・ヒューズ: 3.15A×2
- ・原理: 2 ペーストタイプ(カートリッジ)の歯科用シリコーン印象材を自動練和する。

【使用目的又は効果】(**)

- ・使用前にチェアサイドですぐに印象材を混ぜ合わせるために使われる電動式器具をいう。

【使用方法等】(**)

設置方法

- ・傾斜、振動、衝撃などの加わらない場所に設置すること。
- ・本体、電源アダプターを直射日光にさらさないこと。

使用方法

- ・電源を入れる。
- ・プランジャー操作ボタンを押し、プランジャーを一番奥まで戻す。
- ・カートリッジを、カートリッジホルダーに挿入する。
- ・練和用ボタンを押し、ペーストを少量押し出してペーストとキャタリストが均一に出ることを確認する。
- ・カートリッジの先端にミキシングチップを取り付け、リングでしっかり固定する。
- ・スイッチを押し続け、練和された印象材をトレー等で受ける。
- ・必要量練和された印象材が得られたら、スイッチから手を離す。
- ・使用環境は18℃～24℃が理想である。

【使用上の注意】(**)

- ・電源プラグをAC100Vのコンセントに接続する際には、必ず3Pコンセントに接続すること。
- ・使用後は必ず電源プラグを抜くこと。
- ・濡れた手(グローブ等を含む)での作業は故障の原因となるので避けること。

- ・誤ってプランジャーとカートリッジ固定溝に指などを挟まれないように十分に注意すること。
- ・カートリッジがホルダーに確実に固定されていないとカートリッジを破損するため、カートリッジはホルダーに確実に固定すること。
- ・使用前に練和用ボタンを押し、ペーストを少量押し出してペーストとキャタリストが均一に出ることを確認すること。
- ・使用後に、必ずミキシングチップを取り外し、スイッチを押しペースト、キャタリストのはき出しを行うこと。
- ・室温10℃付近では性能が十分に発揮されないため、室温が十分に暖まってから使用すること。
- ・使用する際には、暖房器具、開いた窓の付近、太陽光の直接あたる場所で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】(**)

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。
- ・風通しの良い場所に保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃などの加わらない場所に安定状態にて保管すること
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検関わる事項】(**)

- ・しばらく使用していなかった機器を再使用するときには、必ず使用前に機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- ・本製品を適切に使用していた場合に限り3年間保証をする。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(**)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名) RENFERT GmbH

取扱説明書を必ずご参照ください