

ステリナ

SteriNa

超音波 噴霧器

食品添加物認定成分

除菌消臭液をミスト状にして
部屋に散布

診療室や待合室の空間を
スピード除菌



弱アルカリ性により、
安心して使用できます
(経口、眼粘膜、皮膚への
影響ありません)

液体は、
瞬時に強力除菌・
消臭効果を発揮する
ステリナを使用

価格 46,000円

SteriNa(ステリナ)噴霧器専用
20L 100ppm 20,000円

※価格は希望医院価格です。
(価格には消費税は含まれておりません)

『SteriNa』噴霧専用設計

腐食対策超音波ユニット採用 **ACPS 2.0**

霧を発生させる心臓部の超音波振動子をはじめ、各部品は耐塩素仕様のものを採用しました。これにより従来機種に比べ約5~10倍の耐久性を実現しました。(当社比)

⚠️ 超音波振動子は消耗品です

超音波振動子は、使用していると徐々に霧化量が減少していき、交換時期(約3,000-5,000時間)には初期値の半分以下になります。本機的能力を最高に保つためにも、超音波振動子の定期的な交換をお勧めいたします。

※お客様にて部品の交換はできません。お買い求めの販売店までご連絡ください。(有料)



特殊加工超音波振動子

熱くない霧の超音波方式を採用

電源ONですぐに霧が発生し、効率よく次亜塩素酸ナトリウムを放出、室内の除菌・消臭ができます。また**噴霧する霧は熱くない**のでお子様やお年寄りがうっかり触ってしまってもヤケドの心配がなく、どなたにも安心してお使いいただけます。



霧が良く飛び吹出口

間欠運転時間「ユーザー設定」が可能

プリセットモード(1分噴霧/3分6分9分停止)のほか、お使いいただく状況により噴霧・停止時間を設定できる「ユーザー設定」モードを搭載しました。時間はそれぞれ30秒~90分まで自由に設定できます。

(推奨運転条件: 霧化量 大 スピードクリーン30分後 1分噴霧/3分停止)

「スピードクリーン機能」で集中除菌消臭

運転開始時、設定した時間の連続運転を行うことでお部屋に除菌消臭成分を満たし、集中除菌消臭をします。スピードクリーン時間終了後は、設定している間欠運転モードに自動で切り替わるので、切替操作の手間もなく一日中効率の良い除菌消臭が可能です。

適用床面積 約26畳 ※設置空間条件により増減する場合があります。

仕様一覧

機器名称	超音波噴霧器
給水方式	タンク式 容量約5L(タンク未装着時運転防止機能)
使用液体	SteriNa(ステリナ: 50~100ppm/pH9.5~10.5)対応 ※50ppmでご使用する場合は精製水で希釈してください
給水水温	5~30℃
許容周囲温度	5~37℃(ただし凍結・結露なきこと)
許容周囲湿度	80%RH以下(ただし結露なきこと)
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	25W
重量	乾燥時 約2.5kg/満水時 約7.5kg
外形寸法	193(W)×325[340](H)×275(D)mm ※[]内は吹出口装着時
電源コード	2Pプラグ付きコード 約1.9m

電気代・液体節約機能について

本機には液体節約のための2つの便利な機能が搭載されています。

- 霧化量調節機能……霧化量を3段階に切り替えることができます。
- 間欠運転機能……一定時間の運転・停止を繰り返します。
(※連続運転、噴霧・停止時間のユーザー設定も可能)

■各設定の1時間あたりの液体消費量

運転モード 霧化量	連続運転	1分運転/3分停止	1分運転/6分停止	1分運転/9分停止
小	約100~200cc	約25~50cc	約14~28cc	約10~20cc
中	約200~300cc	約50~75cc	約28~43cc	約20~30cc
大	約300~350cc	約75~87cc	約42~50cc	約30~35cc

※上記の液体消費量は概ねの目安です。使用環境(室温・湿度・水温・水質・室内環境・電源電圧・製品個体差等の複合要素)によっては数値が大幅に変わる場合がありますので予めご了承ください。

※風量の調節はできません。

関連製品

除菌・消臭スプレー

SteriNa

ステリナ

食品添加物認定成分

みんなに安心な **除菌** × **消臭** スプレー

次亜塩素酸ナトリウムの力から、細菌やウイルスを強力除菌! 気になるニオイも瞬間消臭!

除菌率
99.9%

食品添加物
認定成分


無香料

アルコール
フリー

成分: 精製型次亜塩素酸ナトリウム・純水
性質: 弱アルカリ性

瞬時に強力除菌・消臭効果を発揮する次亜塩素酸ナトリウム

■使用シーンイメージ

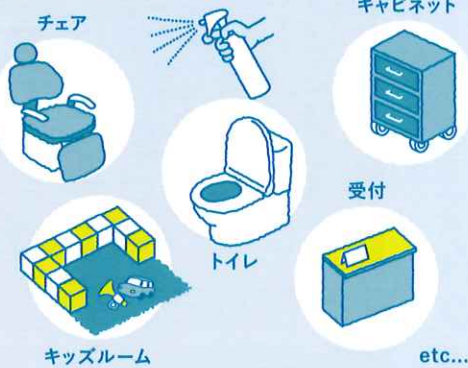

300mL 1,300円

10L..... 16,500円

有効塩素濃度200ppm

※価格は希望医院価格です。(価格には消費税は含まれておりません)

ジーシーグループ



株式会社 日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

【製造元】
株式会社 星光技研

【販売元】
SSP株式会社

ご用命は