

サマリタンPADシリーズに新機種登場

CPRレートアドバイザー機能を搭載し 質の高い胸骨圧迫をサポート



耐用期間

8年

長期保証

8年

追加費用[※]

0円

※本体のみご購入のお客様は、定期交換時や救命使用した場合は、消耗品の購入が必要です。



耳マーク

サマリタンPADシリーズは、**耳の不自由な方も**わかりやすく操作できるように配慮した製品です。

キャリングケース付属



自動体外式除細動器(AED) サマリタンPAD 450P

5232300 本体のみ ￥ 272,000 (税抜)

5232400 **8年保証安心パック** ￥ 326,000 (税抜)

5232500 **8年保証安心パック**
未就学児用パッドパック付 ￥ 386,000 (税抜)

8年保証安心パックとは

定期交換分の消耗品が費用に含まれているため、追加費用は一切発生しません。万が一、救命使用した場合でも、回数に制限なく補充いたします。定期交換分の消耗品は交換時期に自動送付しますので、お客様による期限管理も不要です。

※消耗品定期交換サービス内容

8年分のバッテリーと電極パッドを当社にて有効期限管理のうえ交換時期に送付を行うほか、万一救命使用した場合は回数制限なく臨時交換いたします。

※ユーザー様が医療機関・消防機関・高齢者施設の場合、8年保証安心パックの対象外とさせていただきます

サマリタンPAD450Pだけの新機能

適正な胸骨圧迫を音声と光でサポート

CPRレートアドバイザー機能搭載

突然の心肺停止患者に対しては、早期の電気ショックはもちろん、胸骨圧迫を適切に行うことが救命率だけでなく、**社会復帰率を高める**ことに寄与するとされています。

サマリタンPAD450Pは胸骨圧迫の適正テンポをメトロノーム音で示すだけでなく、胸骨圧迫を開始していない場合は「**心肺蘇生を始めてください**」と音声で案内することで、中断のない質の高い胸骨圧迫をサポートします。

また、胸骨圧迫の回数を解析し、適切なテンポで胸骨圧迫が行われている場合はこまめに「**良いテンポです**」と救助者へフィードバックします。

良いテンポです (Good tempo)

遅い (Slow) 早い (Fast)

もっとはやく押ししてください (Push faster)

遅い (Slow) 早い (Fast)

もっとゆっくり押ししてください (Push slower)

遅い (Slow) 早い (Fast)

※胸骨圧迫の状況は、電極パッドが感知する仕組みですので、特別なセンサーは必要としません。



【サマリタン450P仕様】

波 形：二相性(SCOPE™ biphasic)
出力エネルギーシーケンス：(成人)150J・150J・200J (未就学児)50J・50J・50J
充電時間：代表値 150J<8秒 200J<12秒
除細動回数：60回以上(200J時)
解析精度：IEC 60601-2-4
ガイダンス：音声や光で指示
メモリー：内部メモリーに記憶、90分のECGとイベント
パッドバック(電極+バッテリー)：二酸化マンガンリチウム電池、交換期限約4年
防塵・防水保護：IP56
耐 衝 撃：MIL STD 810F Method 516.5 Procedure1 (40G's)
耐 振 動：MIL STD 810F Method 514.5+
Category 4 Truck Transportation - US highways
Category 7 Aircraft - Jet 737 & General Aviation(Exposure)
動作温度：0~50℃
保管温度：0~50℃
大 小 寸：本体/約20(縦)×18.4(横)×4.8(厚み)cm
キャリングケース/約22(縦)×20(横)×12(厚み)cm
重 量：1.1kg(バッテリー含む)
CPRサポート機能：ベース音(110回/分)、CPRレートアドバイザー機能
その他：耳マーク(耳の不自由な方へ配慮した製品であることを示すマーク)付
付属品：キャリングケース、レスキューセット、AEDステッカー、操作説明DVD
一般的名称：非医療従事者向け自動除細動器
医療機器分類：高度管理医療機器-特定保守管理医療機器
医療機器承認番号：23000BZ100009000
北アイルランド製

本体のみ(消耗品定期交換サービスなし)の消耗品・別売品

成人用パッドバック (電極+バッテリー)

5231000 ￥41,000 (税抜)

一般名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器承認番号：13B1X10209000902
交換期限：約4年

未就学児用パッドバック (電極+バッテリー)

5231100 ￥28,000 (税抜)

一般名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器承認番号：13B1X10209000903
交換期限：約4年

いざという時のために、臨場感をもってトレーニング AEDトレーナー

5232600 450P-T ￥105,000 (税抜)

※AEDトレーナーはエネルギー出力、解析機能は内蔵していません

電源：充電式電池

【セット内容】
本体、リモコン
トレーナー用パッドバック
トレーナー用電極
充電用ACアダプタ
ソフトキャリーケース



補 充 品 トレーナー用交換電極

5231700 10組 ￥9,9000 (税抜)

忘れないで日常点検！

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

電極/パッド、バッテリーには有効期限があります。電極/パッドは再使用できません。不測の事態が発生した場合、又は譲渡時、廃棄時には、製造販売業者又は販売業者の連絡先に速やかに御連絡下さい。
設置の際には必ず取扱説明書及び添付文書をお読み下さい。

※本パンフレットの表示価格は、2020年10月現在のメーカー希望販売価格です。

★お問い合わせ・お申し込みは下記の代理店へどうぞ



■代理店・サービスのゆきとどいた技術と信用の店

本 社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目2番29号
TEL(052)951-9251 FAX(052)951-6454
東 京 支 店 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1丁目9番1号
TEL(03)3915-2221 FAX(03)3917-2221
大 阪 支 店 〒547-0035 大阪市平野区西脇3丁目3番2号
TEL(06)6702-9991 FAX(06)6702-9522
福 岡 営 業 所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4丁目5番7号
TEL(092)471-1477 FAX(092)471-0237

ホームページ：www.yagami-inc.co.jp