



# 8年保証安心パック

耐用期間

**8年**

長期保証

**8年**

追加費用

**0円**



# AED

自動体外式除細動器



8年分の消耗品交換サービスがついた  
8年保証安心パック!  
長期保証で長く安心して使用できます。



自動体外式除細動器 (AED)  
サマリタンPAD350P  
8年保証安心パック

5230800 **¥ 293,000** (税抜)

5230900 **¥ 353,000** (税抜)  
未就学児用  
パッドパック付



自動体外式除細動器 (AED)  
サマリタンPAD450P  
8年保証安心パック

5232400 **¥ 326,000** (税抜)

5232500 **¥ 386,000** (税抜)  
未就学児用  
パッドパック付



機器の仕様はP.3に掲載 ▶▶

\*ユーザー様が医療機関、消防機関、高齢者施設の場合、本パック対象外とさせていただきます。

耐用期間

長期保証

長く安心して使用できる

**8年**

**8年**

**耐用期間・保証期間 8年**

「真のコスト」を知るには長い目で

保証期間



従来のAED



サマリタン

保証期間5年

保証期間8年

3年長い!

5年 8年

8年間機器を保証しますので、最後まで安心してお使いいただけます。

※お客様による不適切な取り扱い及び、天災などの事故は対象外となります。

耐用期間・保証期間がともに8年なので、長く安心してお使いいただけます。またAEDのコストを考える場合、どのくらいの期間使用できるのかが重要なポイントです。ロングライフだからこそ、AED運用のトータルコストを抑えることができます。

「設置後」の悩み解消


追加費用

**0円**

消耗品定期交換サービス※  
万が一使用した場合の消耗品

**完全保証**

8年保証安心パックには、定期交換分の消耗品が費用に含まれています。また、万が一AEDを使用した場合に必要な消耗品も費用に含まれているため、予算化は不要です。さらに、定期交換分の消耗品は交換時に自動送付するため、お客様による消耗品管理も不要です。

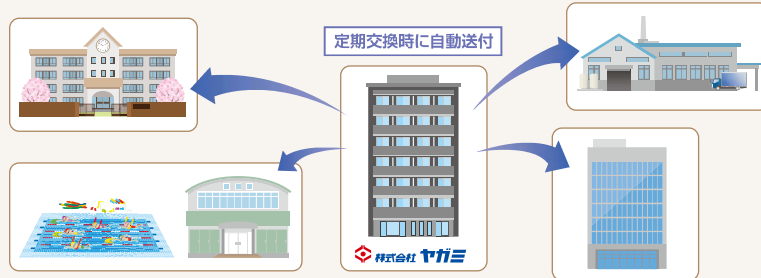

※消耗品定期交換サービス内容

8年分のバッテリーと電極パッドを当社にて有効期限管理のうえ交換時期に送付を行うほか、万一救命使用した場合は回数制限なく臨時交換いたします。

サービス料として、サマリタンPAD 350P/450Pは¥47,000(未就学児用パッドパック付の場合は¥72,000、いずれも税別)が価格に含まれています。

手軽に持ち運べるコンパクトサイズ  
AEDのイメージを一新 サマリタンPAD 350P/450P



350P



450P

450Pには、CPRレートアドバイザー機能を搭載しています



詳細はp5へ▶▶



耳マーク  
サマリタンPAD 350P/450Pは、耳の不自由な方もわかりやすく操作できるように配慮した製品です。

耐用期間

**8年**

長期保証

**8年**

追加費用

**0円**

自動体外式除細動器(AED) サマリタンPAD  
8年保証安心パック

5230800 350P	¥ 293,000 (税別)
5230900 350P 未就学児用パッドパック付	¥ 343,000 (税別)
5232400 450P	¥ 326,000 (税別)
5232500 450P 未就学児用パッドパック付	¥ 386,000 (税別)

※ユーザー様は医療機関、消防機関、高齢者施設の場合、本パック対象外とさせていただきます。

※お客様による不適切な取り扱い及び、天災などの事故は対象外となります。

サマリタンPAD 350P/450P(通信機能付)は  
p6に掲載▶▶

忘れないうちに日常点検!

AEDは救急処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

<仕様>

波 形: 二相性(SCOPE™ biphasic)  
出力エネルギー: (成人) 150J・150J・200J  
シークエンス: (未就学児) 50J・50J・50J  
充電時間: 充電時 150J・200J 20分未満  
除細動回数: 60回以上(200J時)  
解析精度: IEC 60601-2-4  
ガイダンス: 音声や光で指示  
メモリー: 内部メモリーに記憶、90分のECGとイベント  
パッドパック: 二酸化マンガンリチウム電池、(高電圧/高容量) 交換期約4年  
防塵・防水保護: IP56  
新 音 聲: MIL-STD 810F Method 5 16.5 Procedure 1 (40G's)  
耐 振 動: MIL-STD 810F Method 5 14.5+  
Category 4 Truck/Transportation + US highways  
Category 7 Aircraft + Jet 737 & General Aviation(Exposure)  
動作温度: 0~50℃  
保管温度: 0~50℃  
大 小 寸: 本体約20(縦)×18.4(横)×4.8(厚み)cm  
キヤリングケース: 22(縦)×20(横)×12(厚み)cm  
重 量: 1.1kg(リチウム電池)  
CPRサポート機能: ベース音(110回/分)、CPRレートアドバイザー機能(450Pのみ)  
その他: 耳マーク(耳の不自由な方へ配慮した製品であることを示すマーク)付  
付属品: 成人用パッドパック、キヤリングケース、レスキューセット、  
AEDステッカー、操作説明DVD、簡易操作説明書、取扱説明書  
一般的な名称: 非医療従事者向け自動除細動器  
医療機器分類: 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器  
医療機器承認番号: 22800B2100030000(350P)、23000B2100009000(450P)  
北アイルランド特製

品質保証  
販売許可

## 消耗品交換サービスが付かない本体のみはこちら

自動体外式除細動器 (AED) サマリタンPAD

5230700 350P

¥ 220,000 (税抜)



※機器本体の耐用期間及び保証期間は8年です。  
※定期交換時(4年に1回)や使用後の消耗品は別途購入が必要です。

5232300 450P

¥ 259,000 (税抜)

### 補充品・別売品

成人用パッドパック (電極+バッテリー)		未就学児用パッドパック (電極+バッテリー)		ハートサインリュックサック	
5231000	¥ 41,000 (税抜)	5231100	¥ 28,000 (税抜)	5231400	(税抜)
一般的名称: 体表用除細動電極 医療機器分類: 一般医療機器 高規格品目番号: 1337 X1 0209000902 交換期間: 約4年		一般的名称: 体表用除細動電極 医療機器分類: 一般医療機器 高規格品目番号: 1337 X1 0209000903 交換期間: 約4年		重量: 約900g	

## コンパクトなボディに多くの特長を備えています

### Point 1

## 気軽に持ち運べる約1kgのコンパクトボディ

ビジネスバッグに入るくらいのサイズで、重量はバッテリーを含め1,1kg。設置場所や持ち運びに困ることはありません。



### Point 2

## ケースに入れたまますぐに使用可能

AEDを使用する場面では、迷わず正しく1秒でも早く電気ショックすることが求められます。しかし、ほとんどのAEDは専用ケースから取り出さないと、電源ボタンを押すこともできません。サマリタンPAD350P/450Pは、ケースに入ったままで電源ONから電気ショックまでの全ての操作が行えます。



次ページに続く▶▶

### Point 3

## 高い防塵・防滴性能 IP56

船舶の上や埃の多い工事現場、悪天候で活動する救護隊など幅広い環境下で使用できます。



### Point 4

## 音声と光で操作をサポート

次に何をすべきか、音声だけでなく光でも案内するので、耳の不自由な方にも配慮した設計になっています。また、機器の状態が正常な時は「緑色」、パッドパックの有効期限切れやバッテリーの電圧低下などの時は「赤色」で表示するインジケータ付です。



機器の状態を示すインジケータ

耳の不自由な方の使用にも配慮した設計




耳マーク

サマリタンPAD 350P/450Pは、耳の不自由な方もわかりやすく操作できるよう配慮した製品です。

### Point 5

## 適正な胸骨圧迫をサポートする CPRレートアドバイザー機能 (450Pのみ)

突然の心肺停止患者に対しては、早期の電気ショックはもちろん、胸骨圧迫を適切に行うことが救命率だけでなく、社会復帰率を高めることに寄与するとされています。サマリタンPAD450Pは胸骨圧迫の適正テンポをメトロノーム音で示すだけでなく、胸骨圧迫を開始していない場合は「心肺蘇生を始めてください」と音声で案内することで、中断のない質の高い胸骨圧迫をサポートします。また、胸骨圧迫の回数を解析し、適切なテンポで胸骨圧迫が行われている場合はこまめに「良いテンポです」と救助者へフィードバックします。

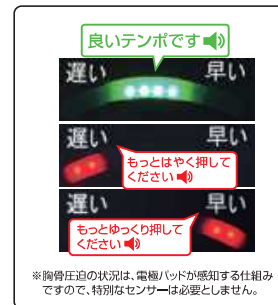

※胸骨圧迫の状況は、電極パッドが感知する仕組みですので、特別なセンサーは必要としません。



AEDトレーナーはp12に掲載▶▶