

## タインープラス

### 【禁忌・禁止】

- (1) 目的以外の使用禁止: 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- (2) 注意事項の厳守: 器具の正しい使用のために、注意事項を必ず遵守すること。
- (3) 異常時の使用禁止: 劣化や異常が見られた場合には、器具の使用を中止すること。
- (4) 改造の禁止: 器具の形態変更や改造等は絶対にしないこと。
- (5) 口腔内では使用しないこと

### 【形状・構造及び原理等】

【外観写真】



付属品(\*) : JDS アルミナ 100g

### 原理

本品は受動型機器であり、歯科用ユニットなどにより供給されるエアースourceにより、専用ジャーに充填された粉末を噴射する。

### 【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いたり、補綴物等の表面を粗面にすることで、接着性を付与・強化する。

### 【使用方法等】

歯科用ユニットとの接続

エアータン用ホース(4ホール)をハンドピースエンドのアタッチメントに取り付ける。

フライアーム型の歯科用ユニットには装着できません。

### 使用方法

- ① ハンドピースをペングリップに保持します。
- ② ノズル先端を目的に合わせ、対象物から2~10mm離します。対象物との距離が離れると、処理面積が広がります。
- ③ フットペダル(ドライブエアのみ)を押すと始動、離すことにより停止します。

### 【使用上の注意】

#### 1) 使用注意

- ① 本品のノズルを顔や目に向けないようにして下さい。
- ② 本品をご使用される場合は、常に保護メガネをご使用下さい。
- ③ 本品の操作は、集塵器内に噴射された研磨材を吸引しながらご使用下さい。
- ④ 空気中に飛散した研磨材により目や鼻や喉を傷めたり、眼鏡を傷つけることがあります。
- ⑤ 飛散した研磨材により光学機器を含めた器械類の故障の原因になることもあります。
- ⑥ 歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

#### 2) 重要な基本的注意

- ① 歯科用ユニットに接続時、ウォーター金具には絶対に接続しないでください。
- ② 本品の使用により、研磨材が目に入った場合は、多量の水で洗い流し、必ず眼科医の診断を受けて下さい。
- ③ 本品は歯科用のみに使用し、説明書に記載の用途以外には使用しないでください。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光、高温、多湿を避けて、保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
  - ① ご使用後は、本品をエアースourceから、必ず外して下さい。
  - ② 水のかからない場所に保管して下さい。
  - ③ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずる恐れのない場所に保管して下さい。
  - ④ 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等に対する安定状態に注意して下さい。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
2. 暫く使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず本品が正常に且つ安全に作動することを確認すること。
3. 強い衝撃を与えないこと。落下させないように注意すること。

#### 【清掃方法】

1. 使用後は速やかにハンドピースおよびノズル等の外装を拭き、十分に乾燥させてください。
2. 薬液を使用する場合は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を遵守してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

GUANGZHOU CONGHUA SHENGHUA INDUSTRY CO., LTD. (中国)