

ツイスターII

【形状・構造及び原理等】(**)

- ・形状、型式
ツイスターII1826-1000



- ・電圧 : 100-240V 50/60Hz
- ・消費電力 : 180VA
- ・装置ヒューズ : T4AL、250VAC
- ・バキューム : 16L/min
- ・寸法 : 152(W) × 285(H) × 235(D)mm(*)
- ・重量 : 5.2Kg(カップなし)
- ・トルク : 1.2N/m

- ツイスターII ベンチュリ1827-1000



- ・電圧 : 100-240V 50/60Hz
- ・消費電力 : 180VA
- ・装置ヒューズ : T4AL、250VAC
- ・バキューム : 24L/min
- ・エア使用量 : 46L/min
- ・接続圧 : 5.0~6.5 bar
- ・寸法 : 152(W) × 320(H) × 235(D)mm(*)
- ・重量 : 4.0Kg(カップなし)
- ・トルク : 1.2N/m

- ・原理 : 埋没材又は石膏の粉末と水を減圧下で自動練和するために使用する。


【使用目的又は効果】(**)


- ・減圧下で埋没材又は石膏の粉末と水を練和する攪拌練和装置をいう。通常、混和用ボウル、電動式攪拌装置及び真空ポンプを備える。


【使用方法等】(**)

準備段階

- ・ベンチュリの場合にはエアースホースを接続し、エアーを供給する。
- ・メインスイッチをONにする。
- ・練和の設定を行う。

 を押し回転数を設定する。(100~450rpm)

 を押し攪拌時間を設定する。(0:00~9:55min)


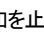
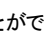
 を押しバキュームを調整する。

(70~100%の間で5%単位)

ただしベンチュリの場合は(80/100%)

各調整は  を回して値を調節する。

練和段階

- ・標準カップ(500mL)が装備されているが練和量によっては、オプションから適切なカップを選択する。
- ・カップに練和する材料と指定された量の水をいれてスパチュラ等でよく練和する。
- ・カップを装置本体に取り付ける。取付けを行うとバキュームが開始される。この時、バキュームメーターが50%を超えるまでカップは離さないこと。
- ・カップ取り付け後スタートボタンを押すと練和が開始され、練和時間が終了するとピープ音がします。
- ・ピープ音がしたら  (ストップボタン) を押し、バキュームが抜けるのを待ってからカップを取り外す。
- ・練和の途中で練和を止める場合は  (ストップボタン) を押す。
- ・もう一度  (ストップボタン) を押せば、バキュームが抜けカップが取り外すことができる。

【使用上の注意】(**)

- ・練和量に応じて適切なカップを使用すること。カップに対して練和量が少ない場合、練和が不十分になることがありますので注意すること。又、カップに対して練和量が多量になると故障の原因になる場合があるので注意すること。
- ・本製品はシンターフィルター及びスポンジフィルターを装着しない状態で使用しないこと。
- ・カップの接合縁と吸引口は改造しないこと。損傷や怪我をする恐れがあります。
- ・シンターフィルターは月に1回以上超音波洗浄器等を使用し清掃すること。清掃後はよく乾燥をさせてから装着を行うこと。
- ・攪拌ブレードはカップなしでは絶対に取りつけないこと。
- ・シリコーン印象材を練和する際に製品によってマイクロバブルが発生する場合がありますので、その際にはバキュームの調整を80%までにして下さい。(シリコーン印象材製品の製造販売業者の指示に従い正しく使用して下さい)
- ・スポンジフィルターは、使用後汚れを確認の上適時水洗いをする。清掃後はよく乾燥をさせてから装着を行うこと。
- ・ベンチュリに装着されているエアフィルターは汚れを確認し、清掃を行うこと。

取扱説明書を必ずご参照ください

【保守・点検に係わる事項】

- ・本製品は歯科医療従業者以外が触れないように適切に保管、管理すること。
- ・本製品を適切に使用する限り3年間保証します。(カップ、攪拌ブレード、フィルター等の消耗品はこの保証からは除外になります)
- ・次の接合面等は機能・安全面の維持のため清掃をし、常に清潔な状態を保つこと。
 パッキン・・・装置/攪拌ブレード、
 パッキン・・・カップ/攪拌ブレード
 (パッキンは月に1度程度ワセリン等を塗り、清潔な状態を保つこと)
- ・次のフィルター類は汚れを確認し清掃を行うこと。清掃を行っても汚れが取れない場合には交換を行うこと。
 シンターフィルター(1回/月程度超音波洗浄器等を用いて清掃)
 スポンジフィルター(1回/日汚れを確認し、汚れている場合は水洗い清掃)
 エアーフィルター(ベンチュリのみ)
 頻繁に汚れる場合は、別売のフィルター圧力調整器(2929-0000)等を使用して下さい。

【不具合現象と自己点検項目】

ツイスター II

不具合現象	故障原因	自己点検・対策
スイッチが入らない・切れない	・電源に接続していない ・ヒューズの欠陥	・電源点検 ・ヒューズの交換
回転(モータ)が始動しない	・ヒューズの欠陥 ・モーターの故障	・ヒューズの交換 ・修理依頼
バキュームが弱い	・フィルターの詰まり ・パッキンの汚れ ・ポンプ・バルブの故障	・フィルターの清掃 ・接合面の清掃 ・修理依頼
バキュームの抜けが非常に遅い	・フィルターが汚れている ・電磁弁の故障	・フィルターの清掃及び交換 ・修理依頼
バキュームが停止しない	・カップ認識ピンの故障	・修理依頼
攪拌ブレードが回転しない	・カップ、攪拌ブレードが汚れている。 ・ヒューズ切れ	・カップと攪拌ブレードの清掃 ・ヒューズ交換

ツイスター II ベンチュリ

不具合現象	故障原因	自己点検・対策
スイッチが入らない・切れない	・電源に接続していない ・ヒューズの欠陥	・電源点検 ・ヒューズの交換
回転(モータ)が始動しない	・ヒューズの欠陥 ・モーターの故障	・ヒューズの交換 ・修理依頼
バキュームが弱い	・コンプレッサーに接続されていない ・接続している圧力が低い ・エアーホースに穴が空いている。または、途中でホースが折れ曲がっている。 ・フィルターの詰まり ・パッキンの汚れ ・ポンプ・バルブの故障	・コンプレッサーに接続を行う ・接続圧は5.0~6.5barにしてください。 ・接続しているエアーホースを点検し、必要に応じて交換を行ってください。 ・フィルターの清掃 ・接合面の清掃 ・修理依頼

バキュームが引かない	・カップ認識ピンがはさまっている	・ピンの周囲の清掃 ・修理依頼
バキュームが停止しない	・カップ認識ピンの故障	・修理依頼
攪拌ブレードが回転しない	・カップ、攪拌ブレードが汚れている。 ・ヒューズ切れ	・カップと攪拌ブレードの清掃 ・ヒューズ交換

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (**)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名) RENFERT GmbH

取扱説明書を必ずご参照ください