

ガリレアンルーペ UL マルチ TTL タイプの注意事項

ガリレアンルーペ UL マルチ TTL タイプのレンズには写真のようなゴム製の細い O-ring が装着されています。



O-ring



O-ring が装着された状態



O-ring がはずれた状態

この O-ring はレンズの固定を補助する役目を持っています。ただし、プロテクトアイグラスのネジ穴の奥までレンズをきっちり押し込もうとするとこの O-ring が切れてレンズが固定されなくなり、その結果、下の写真のように水平位置に固定されない状態になってしまいます。



従いましてレンズをプロテクトアイグラスに装着する場合は、レンズを回転してネジ穴にいれていき、少し締まってきた手ごたえを感じたところで押し込むのをやめてレンズを水平位置に戻すようにして装着するようにお願いします。

(株)日本歯科商社 品質保証部