

医療用品(03) 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋 JMDN70911000

VIP GLOVE ニトリルタイプ ライト

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・この製品は合成ゴムを使用しています。合成ゴムはかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血液低下、ショックなどのアレルギー性症状をまねに起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し医師に相談のこと。*
- ・合成ゴムによるアナフィラキシー様症状の経験がある医療従事者の使用及び患者への使用禁止。
- ・この製品は歯科用デスポーザブル製品なので再使用禁止。


【形状・構造及び原理等】

形状：左右兼用型歯科用グローブ

型式：XS、S、M、L

構造：グローブの寸法・計測部位

厚さ (A)・幅 (B)・全長 (D)

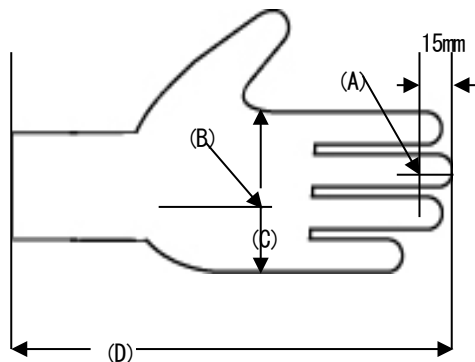

サイズ	各部の基準値(寸法/mm)			
	A(厚さ) 中指	B(厚さ) 掌部中央	C(幅)	D (全長)
XS	0.08±0.03	Min. 0.05	76±4	230以上
S	0.08±0.03	Min. 0.05	86±4	230以上
M	0.08±0.03	Min. 0.05	98±4	230以上
L	0.08±0.03	Min. 0.05	107±4	230以上

- ・主材料：合成ゴム
- ・左右兼用、未滅菌タイプ
- ・表面性状：細かい梨地状、パウダーフリー

- ・原理：手の形状に合わせて作られた合成ゴム製の手袋で、手に被せることで歯科の診察、治療及び処置時に感染及び汚れ等から守るために使用する。

【使用目的又は効果】

- ・本製品は歯科の診察、治療及び処置に用いるゴム製又はビニール製の手袋をいう。手術用に用いるものを除く。

【使用方法等】

- ・最小包装単位包装から手袋を取り出す。
- ・手に装着する。
- ・使用は1回限りで破棄すること。

【使用上の注意】

- ・本製品は、刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので注意すること。
- ・本製品は未滅菌です。
- ・使用前にピンホール、破れが無いことを確認の上、使用すること。
- ・合成ゴムによるアレルギーの既往歴のある方は使用しないこと。
- ・本製品はデスポーザブルタイプですので、感染防止のため患者ごとに新しいものに取り替えること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・品質保持のため、高温・多湿・直射日光のあたる場所は避けて、保管してください。
- ・使用期間：製造年月より3年間(個装箱に記載)
(自己認証による)
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

ハータレガ社(マレーシア)

(英名) Hartalega Sdn. Bhd