

AKIYAMA'S MICROキャリア

インプラント等の外科手術において
増骨する箇所に移植材を填入する
ためのキャリアです。




直径2mmのスペースがあれば、12mmまでの深部に正確に移植材を填入する事が可能です。
キャリアのワンプッシュ量は、乾燥バイオオス (Geistlich Bio-Oss®) 0.01gです。

使用方法

アマルガムを填入するのと同じ原理で移植材をキャリア内部に装填します。

切開された増骨箇所に先端部を挿入し、後端部を押すことで移植材を押し出し填入させます。

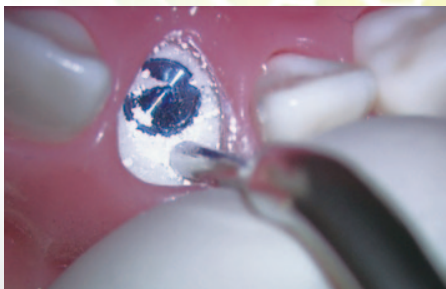

非常に狭い骨とインプラントとの隙間に、移植材を正確に填入できます。



歯肉を大きく切開する事なしに、確実に骨欠損部に移植材を填入する事ができます。



ソケットリフトにおいて、直径2mmのドリルホールから正確かつ安全に、深部へ移植材を填入する事ができます。

価格 36,000円

包装 1本 / 全長160mm

一般的名称: 歯科用インプラント手術器具
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 09B2X00010G00065
製造元: 株式会社シオダ

※ 価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれておりません)。



JAPAN DENTAL SUPPLY
0513SK01 ■■

発売元

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪本社: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

製造販売元 株式会社シオダ

ご用命は