

機械器具(70) 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用形成器具 JMDN70760000

ERGO ワックスインスツルメント

【形状・構造及び原理等】(**)

・形状、型式
5本セット・・・・・・・・・・1034-2000



No.1・・・・・・・・・・1034-2001



No.2・・・・・・・・・・1034-2002



No.3・・・・・・・・・・1034-2003



No.4・・・・・・・・・・1034-2004



No.5・・・・・・・・・・1034-2005



- ・材質：ステンレス(*)
- ・外観：本体周辺にバリがなく、破損、変形、傷、ヒビなどの異常がないこと。
- ・原理：先端部をバーナー等で加熱し、ワックスアップをするために使用する。ナイフ形状をした先端部はワックス等をカービングするために使用する。

【使用目的又は効果】(**)

- ・ワックス、石膏、レジン又はセラミック等を築盛あるいは彫刻形成するために用いる器具をいう。作業を容易にするために、補助的に種々の材料を併用することがある。(*)

【使用方法等】(**)

- ・先端部をバーナーなどで加熱し、ワックスをすくい、盛り上げて使用する。
- ・No.1とNo.3は咬合面のワックスアップと外形形成に用いる。
- ・No.4は大量のワックスを盛る場合に使用する。

- ・No.2とNo.5はクラウンブリッジのワックスアップ、カービング等をするために使用する。

【使用上の注意】(**)

- ・焼入れされた先端部は精密なので、丁寧に扱い、長時間強い炎にあてないこと。(*)
- ・ワックスを削る用途に設計された形状のものは原則として炎にあてないこと。
- ・本製品は縁端が鋭いため、使用中に手指などを傷つけないように注意すること。(*)
- ・本製品に熱を加えて使用する場合、火傷などに注意すること。
- ・本製品を使用した後には汚れをよく拭き取ること。(*)

【保管方法及び有効期間等】(**)

- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(**)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名) RENFERT GmbH